

SANILUXE PRETO

Finalidade: Almofada anti-escaras em forma de ferradura Saniluxe, previne o aparecimento de úlceras de pressão, próprias de corpos que permanecem imóveis durante longos períodos de tempo.

Recomendável no pós-parto, hemorróidas, fistulas. Grau de risco Médio.

Características:

Saniluxe (60% Polyester, 40% poliuretano)

Capa Exterior: Poliuterano

Interior: Enchimento de fibra poliéster siliconada

Peso máximo: 80 kg

Lote: Ver embalagem

Cor: Preto

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 114105

Marca: UBIO Qualitylife

Dimensões: 44x44x11 cm

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante: C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Deve ser evitado o contacto da almofada com produtos corrosivos, decapantes, dissolventes e objetos “pontagudos-cortantes”. Evitar o contacto prolongado com líquidos. Conservar a almofada preferencialmente na posição horizontal, protegidos da luz natural e da humidade. Capa lavável à mão ou na máquina com detergente neutro a uma temperatura máxima de 95°C . Não usar centrifugação. Não usar lixívia.

Não molhar o conteúdo da almofada.  GeriMais

Instruções de Utilização: Adaptada a diferentes tipos de assentos, o que permite utilizar cadeira de rodas, sofás, etc. Posicionar a almofada sobre uma base plana. Escovar ou sacudir periodicamente a capa de fibra para manter a almofada em condições ótimas. Limpar a mão com pano húmido e com produtos neutro.

Imagens do Artigo:

