








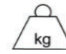


**Banco Giratório Santorini**  
*Manual de instruções*



**REF. 812191**

**SÍMBOLOS PRESENTES NO RÓTULO OU NO MANUAL DE INSTRUÇÕES**

	<p><i>Endereço do fabricante</i></p>		<p><i>Convite para ler o manual de instruções</i></p>
	<p><i>Data de fabricação</i></p>		<p><i>Respeitar as instruções de segurança</i></p>
	<p><i>Número do lote</i></p>		<p><i>Conformidade CE</i></p>
	<p><i>Referência do produto</i></p>		<p><i>Peso máximo do utilizador</i></p>



## IMPORTANTE

Leia atentamente o manual antes de utilizar este produto e guarde-o para referência futura.

Usuário: Se não conseguir ler ou compreender os avisos, precauções ou instruções, entre em contato com seu profissional de saúde ou distribuidor antes de usar este produto para evitar riscos e danos.

Consulte seu médico ou especialista em saúde antes de utilizar um dispositivo de assistência técnica. Ele aconselhará e informará sobre o uso mais adequado para sua situação.

Distribuidor: Este manual deve ser entregue aos usuários deste produto.

## DESTINO DO PRODUTO

O banco giratório Santorini é um auxiliar técnico para a higiene pessoal destinado a pessoas idosas, com mobilidade reduzida, com deficiência, feridas ou que podem perder facilmente o equilíbrio.

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O banco giratório Santorini é um dispositivo médico destinado a auxiliar na higiene de pessoas com mobilidade reduzida ou dificuldades de equilíbrio.



## PRECAUÇÕES DE USO



O não cumprimento das precauções pode causar ferimentos graves.

- Nunca ultrapasse o peso máximo suportado de 135 kg.
- Certifique-se de que o produto está em boas condições de funcionamento.
- Verifique visualmente o produto.
- Confirme a estabilidade do banco antes do uso.
- Use apenas em uma superfície plana para evitar tombos.
- Verifique sinais de desgaste do banco.
- Nunca se incline ao sentar-se.

- Em caso de peças danificadas, quebradas ou ausentes, entre em contato com o revendedor.

## MONTAGEM

1. Retire o conteúdo da caixa.
2. Monte as pernas inserindo os tubos de ajuste de altura nas extremidades de borracha branca. Certifique-se de colocar as extremidades nas extremidades sem o pino de latão. Repita o procedimento para os outros 3 tubos.
3. Insira o tubo de ajuste de altura na parte inferior da perna maior, pressionando o pino de latão. Repita o procedimento para os outros 3 tubos. Insira o tubo de ajuste de altura na parte superior da perna pressionando o pino de latão.
4. Coloque o assento de cabeça para baixo sobre uma superfície plana. Insira cada perna no assento pressionando o pino de latão localizado no recipiente da perna e inserindo-o no fundo do assento. Um clique indicará que a perna está bem colocada. Repita o procedimento para as outras 3 pernas.
5. Vire o banco para a posição correta. Fixe o suporte de sabonete colocando-o entre as pernas e inserindo os cruzamentos nos furos das braçadeiras brancas das pernas.

## USO

### AJUSTE DE ALTURA DAS PERNAS

- Ajuste a altura de cada perna de acordo com suas necessidades, certificando-se de que todos os tubos estejam à mesma altura. Quando a altura desejada for alcançada, bloqueie as pernas no lugar alinhando os botões nos furos apropriados.
- Para garantir que as pernas estejam bem no lugar, pressione os tubos ou puxe-os para cima..

### ROTAÇÃO DO ASSENTO


Para girar o assento, puxe a alça até que o assento se libere de uma das 4 posições bloqueadas e gire-o para a posição desejada. O assento pode girar em ambas as direções.

Nota: Quatro posições de bloqueio estão integradas no quadro do assento, permitindo que o usuário se levante ou se sente de forma segura. Certifique-se de que o assento esteja em uma das posições bloqueadas antes de se levantar ou sentar.

### SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO

O assento giratório e os dois anéis de rolamento de esferas que movem o assento podem ser substituídos, se necessário. Para remover o assento e os anéis de rolamento, gire o botão de bloqueio (RTL12061-KNOB) sob o assento (RTL12061 SEAT) e os anéis de rolamento (RTL12061-RING). Substitua o assento, os anéis de rolamento e o botão de bloqueio. Aperte até que estejam bem fixos.

## MANUTENÇÃO

 A falta de manutenção e cuidados com o produto pode resultar em risco de lesões graves.

- Limpe regularmente o produto com água morna e um pano macio. Não use produtos abrasivos, detergentes ou produtos solventes.
- Seque com um pano macio e seco.
- O produto pode ser limpo em uma máquina de descontaminação aquosa a 80°C.
- O banco deve ser revisado anualmente, com lubrificação obrigatória.
- É recomendado realizar a manutenção do produto pelo menos uma vez por ano. Se o produto for utilizado intensamente e/ou em um ambiente de múltiplos usuários, recomendamos que a revisão seja feita com mais frequência.
- Em caso de defeito, não tente consertar o produto por conta própria. Consulte um revendedor autorizado.

## TRANSFERÊNCIA DE PROPRIETÁRIO

O produto pode ser reutilizado. Ele deve ser limpo e desinfetado de acordo com as instruções de higiene. Ao transferir o produto, lembre-se de entregar todos os documentos técnicos necessários ao novo usuário. Antes disso, o produto deve ser inspecionado por um especialista autorizado.

## RECICLAGEM

Quando o produto não for mais utilizável e precisar ser descartado: entre em contato com seu revendedor especializado. Se você deseja realizar a reciclagem por conta própria, consulte a empresa local de gestão de resíduos para obter orientações sobre a eliminação.

## ARMAZENAMENTO

O não cumprimento das condições de armazenamento pode levar a uma deterioração do produto e, portanto, a riscos de lesões graves.

- Não armazene o seu produto por um período prolongado perto de fontes de calor ou ao sol (por exemplo: atrás de uma janela ou perto de um radiador) ou perto de fontes de frio.
- Mantenha-o afastado de qualquer chama ou fonte de faíscas.

- Siga as condições para armazenar e guardar o seu produto:
  - Em um local seco e temperado.
  - Proteja o seu produto com embalagem contra poeira e corrosão (por exemplo: materiais abrasivos, areia, água do mar, ar salgado).
  - Armazene todas as peças retiradas juntas, no mesmo local (ou marque-as, se necessário) para evitar misturá-las com outros produtos ao remontá-los.
  - Todos os componentes devem ser armazenados sem peso (não coloque objetos pesados nas peças do produto, não prenda nada...).

## DURAÇÃO DE USO

A vida útil esperada deste produto é de 5 anos, em condições normais de uso, segurança e manutenção para um único usuário. Após esse período, o produto pode continuar a ser utilizado, desde que esteja em boas condições.

Se o produto for utilizado em um ambiente de múltiplos usuários (como um lar de idosos ou hospital), a vida útil pode ser reduzida.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Dimensões totais	Larg. 38 cm x Prof. 38 cm x Alt. 41-58 cm
Dimensões do assento	Larg. 38 cm x Prof. 36 cm x Alt. 2 cm
Assento giratório: 360° com bloqueio de 90°	
Material do assento	Poliuretano
Pés ajustáveis em altura	17,5 cm, em passos de 2,5 cm
Peso do banco	3 kg
Peso máximo permitido	135 kg

## GARANTIA

Este produto tem uma garantia de dois anos a partir da data de compra pelo usuário. IDENTITÉS fornecerá peças de reposição para qualquer peça que quebre devido a defeito de fabricação, design ou material. Entre em contato com o distribuidor onde você comprou o produto caso precise fazer uma reclamação. Defeitos decorrentes de danos acidentais, mau uso, modificações ou desgaste não são cobertos por esta garantia. Entre em contato com o revendedor onde você comprou o produto para aplicar a garantia.

**Distribuído por :**

*Identités – ZA Pole 49  
Bd de la Chanterie  
49124 Saint Barthélemy d'ANJOU*

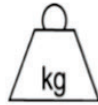

**Peso máximo permitido: 135 kg**