

Finalidade: Almofada anti escaras de flutuação líquida, feita à base de um gel fluído de grande eficácia que ajuda na prevenção do aparecimento de escaras, de úlceras de pressão, próprias de corpos que permanecem imóveis durante longos períodos de tempo. Recomendável no pós-parto, hemorróidas, fistulas. Grau de risco Médio.

Características: Saniluxe – impermeável, suave e lavável, alta resistência.

Exterior: Poliuretano Saniluxe.

Interior: Espuma de PVC, propilenoglicol / gel visco

Peso máximo: 110 kg

Lote: Ver embalagem

Cor: Preto

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 103302

Marca: UBIO Qualitylife

Dimensões: 42x42x6 cm

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante: C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior 2040 - 357 RIO MAIOR qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Deve ser evitado o contacto da almofada com produtos corrosivos, decapantes, dissolventes e objetos “pontagudos-cortantes”. Evitar o contacto prolongado com líquidos. Conservar a almofada preferencialmente na posição horizontal, protegidos da luz natural e da humidade. A capa é lavável à mão ou à máquina com detergente neutro. Pode ser seco a uma temperatura baixa. Não se exponha ao sol. Ferro a 110ºC no máximo, protegendo a parte de trás com um pano.

Importante: Não molhar o interior da Almofada

Instruções de Utilização: Adaptada a diferentes tipos de assentos, o que permite utilizar cadeira de rodas, sofás, etc. Posicionar a almofada sobre uma base plana. Escovar ou sacudir periodicamente a capa de fibra para manter a almofada em condições ótimas. Limpar a mão com pano húmido e com produtos neutro.

Importante: Não molhar o interior da Almofada

Imagens do Artigo:

