



PROTEÇÃO À PROVA DE ÁGUA PARA LIGADURAS OU GESSO
PROTECTOR DE GESSO E LIGADURAS

Adulto -Adulto

115010 Mão Adulto

115011 Antebraço Adulto

115012 Braço inteiro - Adulto

115013 Pé/Tornozelo - Adulto

115014 Meia Perna - Adulto

115015 Perna Inteira - Adulto

115016 Antebraço - Criança

115017 Braço - Criança

115018 Meia perna - Criança

115019 Perna inteira - Criança



Inspecione cuidadosamente todas as peças para identificar fissuras antes de serem utilizadas.



Cuidado

Este produto deve ser utilizado para cuidados terapêuticos e duchas diários. Não para atividades de água recreativa.

O anel de plástico não foi concebido para ter um peso pesado aplicado; NÃO coloque peso no anel de plástico.

Tenha cuidado com a água, pode ficar escorregadio quando molhado.

Consulte o seu médico se o diafragma causar inchaço ou desconforto. Recomenda-se a supervisão de um adulto para crianças.

Instruções de utilização

1. Lime/amacie quaisquer arestas afiadas do gesso antes de utilizar.
2. Segure firmemente o anel de plástico e puxe a capa ou a ligadura.
3. Certifique-se de que o protetor de ligaduras cobre completamente o gesso ou a ligadura. Empurre o anel de plástico para trás em direção ao molde ou ligadura para formar uma vedação para manter a água fora.
4. Seque o diafragma antes de retirar; certifique-se de que agarra o anel de plástico e não o saco de vinil, pois isto pode causar falhas no produto.

Instruções e cuidados

Seque com uma toalha seca.



As pessoas com deficiências graves ou pessoas incapazes de andar sem um ajudante não devem tentar utilizar este produto sem assistência.



Identities - ZA
Pole 49 Bd de la
Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'ANJOU

