



BRAÇO DE APOIO FIDJI SOBRE COLUNA
Manual de instruções
DISPOSITIVO MÉDICO

REF. 815120





INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

PT

IMPORTANTE

Leia atentamente as instruções antes de utilizar este produto e guarde-as para referência futura.

Utilizador: se não conseguir ler ou compreender os avisos, precauções ou instruções, contacte o seu profissional de saúde ou distribuidor antes de utilizar este produto, sob pena de riscos e danos.

Consulte o seu médico ou especialista de saúde antes de utilizar um dispositivo de auxílio técnico. Ele irá aconselhá-lo e informá-lo sobre o produto mais adequado ao seu caso.

Distribuidor: este folheto deve ser entregue aos utilizadores deste produto.


SÍMBOLO QUE FIGURA NA ETIQUETA OU NAS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

	Endereço do fabricante		Convite para consultar o manual de utilização
	Data de fabrico		Respeitar as instruções de segurança
	Número do lote		Conformidade CE
	Referência do produto		Proteger da humidade
	Peso máximo do utilizador		Dispositivo médico

DESTINO DO PRODUTO

O braço de apoio Fidji na coluna é um dispositivo médico. Trata-se de um trilho de aço de alta qualidade fixado ao chão que fornece um suporte estável para ajudar o utilizador a levantar-se e abaixar-se para ir à casa de banho. O apoio é fixado na altura desejada na coluna. Não se destina a ser utilizado no chuveiro.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

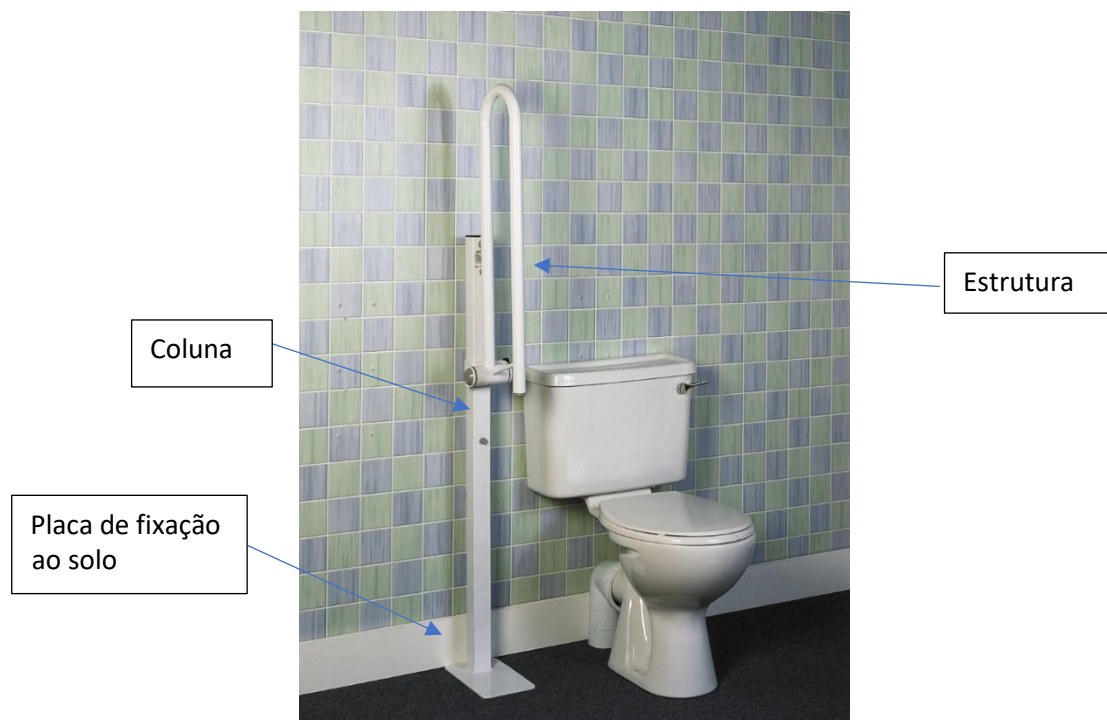

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



O não cumprimento das precauções de utilização pode causar riscos de ferimentos graves.

- Não exceda o limite de peso autorizado de 110 kg.
- Este produto deve ser corretamente montado, instalado e mantido.
- Este produto deve ser instalado por uma pessoa qualificada e competente.
- Nunca perfure o betão pré-esforçado para instalar o trilho de suporte.
- Verifique sempre se há cabos elétricos ocultos e tubos de água durante a instalação; verifique também os requisitos legais relativos à ligação à terra e à colagem de peças metálicas estranhas.
- Inspeccione todas as peças antes da montagem para garantir que não foram danificadas durante o transporte. Se houver danos causados pelo transporte - NÃO UTILIZE. Contacte o seu revendedor para obter mais instruções.
- Antes de utilizar, verifique se os parafusos estão bem apertados e se o produto está estável.
- Certifique-se de que todas as conexões estejam bem apertadas e encaixadas antes do uso.
- Em caso de peças danificadas, partidas, gastas ou em falta, contacte o revendedor.

MONTAGEM E UTILIZAÇÃO

MONTAGEM

1. Posicione a placa de parede contra a parede na altura necessária e marque a posição dos orifícios.
2. Faça os furos, de acordo com as fixações/parafusos utilizados.

Nota: Como o substrato pode variar consideravelmente, não recomendamos nenhuma fixação específica; em caso de dúvida, consulte o seu distribuidor.

3. Coloque a placa de parede contra a parede e fixe-a com os fixadores escolhidos. Depois de montada, verifique se está bem fixada ao chão e se o braço pode ser levantado e baixado sem interferências. Verifique também se o bloqueio por fricção é eficaz e se o trilho de suporte se mantém em qualquer ângulo (ou seja, se não cai sozinho).
4. Importante: Após instalar o produto, aperte e faça uma inspeção final de todos os elementos de fixação.
5. Teste a instalação, certifique-se de que o trilho está rígido e estável.

UTILIZAÇÃO

- Instale o produto apenas numa área onde a superfície de montagem e o suporte sejam estruturalmente sólidos.
- Poderá ser necessário reforçar a superfície de fixação.
- Verifique também o tipo de suporte no qual pretende fixá-lo, por exemplo, tijolo, madeira ou betão. Verifique sempre se o tipo de fixação que vai utilizar é compatível com o suporte.
- Certifique-se de que, quando corretamente colocado, o trilho pode ser levantado e abaixado sem interferência de outras instalações e móveis e que a transferência pode ser realizada com segurança.

MANUTENÇÃO



A falta de manutenção e conservação do seu produto pode causar riscos de ferimentos graves.

- Limpe regularmente o produto com água morna e um pano macio. Não utilize produtos abrasivos, detergentes ou solventes.
- Seque com um pano macio limpo e seco para evitar a oxidação.
- Não utilize produtos de limpeza que contenham fenol ou cloro, pois isso pode danificar os materiais de alumínio e poliamida.
- Verifique periodicamente o desgaste e a solidez de todos os parafusos, porcas e outros componentes.
- Verifique antes de cada utilização se o botão giratório está a funcionar corretamente para o ajuste da altura.
- Em caso de avaria, não repare o produto por conta própria. Consulte um revendedor autorizado.

MUDANÇA DE PROPRIETÁRIO

O produto pode ser reutilizado. Deve primeiro ser limpo e desinfetado, respeitando as normas de higiene. Ao transferir o dispositivo, lembre-se de entregar todos os documentos técnicos necessários ao novo utilizador. Antes disso, o produto deverá ser inspecionado por um especialista autorizado.

RECICLAGEM

Quando o produto se tornar inutilizável e tiver de o deitar fora: contacte o seu revendedor especializado. Se pretender reciclar por conta própria, solicite as diretrizes de eliminação à empresa local de gestão de resíduos.

ARMAZENAMENTO



O não cumprimento das condições de armazenamento pode causar danos ao produto e, consequentemente, riscos de ferimentos graves.

Não armazene o seu produto por um período prolongado perto de uma fonte de calor ou ao sol (por exemplo, atrás de uma janela ou perto de um radiador) ou perto de uma fonte de frio.

Mantenha longe de chamas e fontes de faíscas.

Respeite as condições de arrumação e armazenamento do seu produto.

- Num local seco e temperado

- Proteja o seu produto com uma embalagem contra poeira e corrosão (por exemplo: elementos abrasivos, areia, água do mar, ar salino)

- Armazene todas as peças removidas juntas, no mesmo local (ou identifique-as, se necessário) para evitar misturá-las com outros produtos durante a remontagem.

- Todos os componentes devem ser armazenados sem qualquer carga (não coloque objetos muito pesados sobre os elementos do produto, não prenda nada...).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões totais	Altura da coluna: 110 cm. Comprimento do suporte: 76 cm. Dimensão da consola de fixação: 25 x 15,5 cm / Diâmetro: 32 mm
Carga máxima	110 kg

DURAÇÃO DE UTILIZAÇÃO

A vida útil prevista deste produto é de 5 anos em condições normais de utilização, segurança e manutenção. Após esse período, o produto pode continuar a ser utilizado enquanto estiver em bom estado.

GARANTIA

Este produto tem garantia de dois anos a partir da data de compra pelo utilizador. A IDENTITÉS fornecerá peças de substituição para qualquer peça que se tenha partido devido a um defeito de fabrico, conceção ou material. Contacte o distribuidor onde adquiriu o produto caso necessite de fazer uma reclamação. As avarias resultantes de danos acidentais, utilização indevida, modificações ou desgaste não estão cobertas por esta garantia. Contacte o revendedor onde adquiriu o produto para aplicar a garantia.



Identités – ZA Pole 49
Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'ANJOU



Peso máximo permitido
110 kg