

**Finalidade:**

Cinta abdominal com 3 bandas feita de um tecido elástico macio com um toque de algodão no interior.

Concebido através de bandas unidas mas independentes, que facilitam a adaptação à morfologia do paciente.

Indicado para casos de Pós-cirurgia, Hérnias, Contusão torácica, Abdominoplastia, Lesões musculares abdominais e torácicas e Pós-parto.

**Características:**

Duas cintas elásticas leves e respiráveis.

Fixação ajustável de Velcro®.

Sem látex

24cm de altura

**Dimensões:**

S : 65-80cm

M : 80-95 cm

L : 95-110 cm

XL : 110-125 cm

XXL: 125-140 cm

3XL : 140-155 cm

**Cor:** Bege

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** Regulamento (UE) 2017 /745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** FJ183

**Marca:** EMO

**Declaração de conformidade:** Regulamento 2017/745

**Fabricante:** Especialidades Médico Ortopédicas, SL

**Morada do fabricante:**

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:**

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 °) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário.

**Instruções de utilização:**

Agarrando o cinto em suas extremidades com as duas mãos. Coloque o cinto na área abdominal na altura correta para o uso. Ajustar a tensão e fechar a peça de vestuário por velcro, uma vez obtida a compressão desejada.

**Imagens do Artigo:**