

Finalidade: O Kit de compressão e colchão foi projetado para a prevenção e tratamento de escaras, que podem ocorrer em todas as situações, que exigem em longo internamento hospitalar e/ou domiciliário.

Características: Peso do compressor: 1,10kg; Peso do colchão: 2,3kg; Peso máximo do utilizador: 135 Kg

Nº de células: 130

Fornecimento de energia: ~ 220V 50/60Hz

Cabo de alimentação: 2,20m

Libertação de ar: 6/7LPM

Tempo de ciclo: 6 min.

Ruído: 32-34 dB

Data de inspeção: (Quando Aplicável)

Lote: Verificar embalagem

Cor: Colchão bege e compressor branco e azul

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe II tipo BF

Modelo: LAD462

Marca: Levitas Moretti Série Piuma UP

Dimensões: 200x90x7,6 cm; compressor: 27X13X10,5cm

Declaração de Conformidade: Directiva CE 93/42

Fabricante: Moretti S.p.A.

Morada do fabricante: Via Bruxelles 3 - Meleto

52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

Mandatário Europeu:

Morada do Mandatário Europeu:

Importador e Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Importador e Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Para limpar, passar sobre o compressor e o colchão um pano húmido com um detergente suave e mantenha o dispositivo longe de pó. Escolha sempre um detergente que não contenha agentes químicos que possam afetar as superfícies plásticas.

Instruções de Utilização:

Abrir o pacote; 2. O colchão vem enrolado: remova-o da caixa e desenrole o colchão sobre a cama; 3. Dobre e coloque as bordas do colchão entre a cama e o colchão para fixá-lo e evitar movimentos involuntários; 4. Extrair e descompactar o compressor e, em seguida, colocá-lo no topo dos pés da cama por meio dos ganchos da parte traseira do compressor, ou, alternativamente, coloque-o sobre uma superfície plana. 5. Verifique se o interruptor ON/OFF do compressor está na posição OFF; 6. Conectar os tubos à extremidade inferior do colchão e às boquilhas do compressor; 7. Rode o botão para a direita, trazendo a parte mais estreita para o "+". Desta forma, o compressor irá fornecer a pressão máxima; 9. Ligue a ficha do compressor à tomada de corrente de 220V; 10. Ligar o compressor através do interruptor on/off e esperar 25 minutos para o compressor insuflar totalmente o colchão.

Imagens do Artigo:

