

Finalidade: O Saco Sissel Hot-Cold Soft Pack pode ser colocada precisamente no local onde o tratamento é necessário. A embalagem dá alívio num instante. Pode ser usado para tratamento do pescoço, costas, ombros e rins.

Características:

Reutilizável.

Usar no congelador para tratamento com frio (máximo 2 horas) e no microondas ou com água quente para tratamento com calor.

Exterior em tecido. Não tóxico, reutilizável, higiénico. Retém a flexibilidade mesmo depois de congelado. Instruções impressas no seu exterior.

Medida: 40 x 28 cm

Cor: Azul/vermelho

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Regulamento: (EU) 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: 150.015

Marca: SISSEL

Declaração de conformidade: (EU) 2017/745

Fabricante: SISSEL GmbH

Morada do fabricante:

Bruchstr. 48 67098 Bad Dürkheim Deutschland (Alemanha)

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Nunca deixar o saco aquecer no microondas sem supervisão. Guardar longe da luz solar e quando não está a uso guardar num local seco e escuro.

Instruções de Utilização:

Áreas de aplicação: Inchaços, inflamação, nódoas negras, entorses, lesões de desporto, dores de cabeça, enxaqueca, dores musculares, tratamento de beleza e relaxamento. Ideal para usar nas costas e coxas.

Arrefecimento: olhos irritados, lacrimejantes ou vermelhos, comichão ou inchaço das pálpebras, dores de cabeça, enxaquecas, alergias, febre dos fenos, irritação da pele, por exemplo, após tratamentos cosméticos;

Aquecimento: bloqueio dos seios nasais, preparação para tratamentos, relaxamento.

Imagens do Artigo:

