

Finalidade: Ideal para transportar pessoas com mobilidade reduzida para o duche ou sanita. Permite a recolha de um paciente sentado na cama uma vez que o assento aberto permite ser deslizado por baixo do paciente. Usando a fivela dupla para maior segurança.

Características:

Encosto macio de poliuretano e assento ergonómico e apoio para os pés. 4 Rodas resistentes com travões. Dianteira 12,5 cm e traseiras 7,5 cm. Estrutura de aço galvanizado 2.0 e assento em ABS e poliuretano e pegas em borracha.

Altura ajustável. Sistema de travagem: travão de pé

Peso máximo do utilizador – 120 kg

Peso – 21 kg

Dimensões:

Gerais: L 53,5 x prof 70 x A 76 a 94 cm

Assento: L 42,5 x C 42 x A 42 a 60 cm

Cor: Branco e azul

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Classificação: Classe I

Modelo: 822011

Marca: Identités

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, Nº15, Zona Industrial de Rio Maior, 2040-357 Rio Maior - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Limpe regularmente o produto (todas as rodas, trincos e junções) com um pano húmido e desinfetado. Não utilize produtos abrasivos, detergentes ou solventes.

Seque com um pano macio, limpo e seco. A cadeira deve ser completamente verificada todos os anos, com lubrificação obrigatória.

Use-a apenas em piso nivelado.

Recomenda-se que verifique o produto pelo menos uma vez por ano. Se o produto for submetido a um uso intensivo e/ou utilizado em ambiente multiusuário, recomendamos que seja verificado com mais frequência.

Em caso de avaria, não repare o produto por sua conta. Consulte um revendedor autorizado.

Armazenamento:

Não armazene produto por um período prolongado perto de fontes de calor ou sob luz solar direta (por exemplo, atrás de uma janela ou perto de um radiador) ou perto de uma fonte fria. Mantenha-o num local seco e arejado. Proteja o seu produto embalando-o contra poeira, corrosão (por exemplo, elementos abrasivos, areia, água do mar, maresia)

Garantia:

Este produto tem garantia de dois anos a partir da data de compra pelo utilizador.

Instruções de utilização:

Abriu o equipamento em frente ao paciente que se encontra sentado direito. Levante os pés do paciente para que pousem nos pedais. Certifique-se que os travões estão acionados até que o paciente esteja sentado no equipamento.

O paciente deve inclinar-se para a direita e para a esquerda para rodar e o lado correspondente para que o paciente fique sentado, feche a fivela de segurança na parte de trás.

Destrave os travões após todas as fivelas estejam fechadas. Agarre as pegas da frente para mover o paciente.

Destranque os travões quando o paciente estiver sentado no local desejado.

Imagens do Artigo:

