

SEMENTES DE LINHAÇA

Finalidade: Estas almofadas têm um enchimento de sementes naturais de linhaça. Desenhado para crianças. Hoje, estes produtos são utilizados devido à sua durabilidade e reutilização. O calor que emana, depois de quente, é importante para a terapia, por ser ligeiramente húmido. O enchimento das almofadas SISSEL® é abundante e por isso conserva o calor e o frio durante mais tempo.

Características: Enchimento de sementes naturais de linhaça, capa de algodão

Medida: 45 x 30 cm

Cor: Azul

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Regulamento: (EU) 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: 150.052

Marca: SISSEL

Declaração de conformidade: (EU) 2017/745

Fabricante: SISSEL GmbH

Morada do fabricante:

Bruchstr. 48 67098 Bad Dürkheim Deutschland
(Alemanha)

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão
Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-
357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Nunca deixar o saco a aquecer no microondas ou forno sem o devido cuidado. Guardar longe da luz solar e quando não está a uso guardar num local seco e escuro.

A almofada com sementes de linhaça não pode apanhar humidade.

Instruções de Utilização:

Quente: Ideal para relaxamento muscular, antes de uma massagem ou de fisioterapia. Como remédio caseiro, contra dores nas costas, tensões na nuca/pescoço, prisão de ventre, desconforto e perturbações menstruais. Para alívio, do desconforto reumático (após consulta de um especialista). Aquecimento

- Aquecimento no microondas: Como alternativa às instruções de embalagem, recomendamos o seguinte.

Aquecer a embalagem durante 60 segundos a 600 Watt. Retirar do micro-ondas e verificar a temperatura. Se é necessário mais aquecimento, virar o pacote e sacudi-lo, depois aquecer por mais 20 segundos. Verificar novamente e, se necessário, repetir até se atingir a temperatura desejada. Assegurar-se de que a placa de microondas está limpa e sem qualquer resíduo, a fim de evitar queimaduras no material.

- Aquecimento no forno: Envolver a embalagem em folha de alumínio e aquecer durante 4 - 8 minutos a 70 - 100°C. Tenha cuidado quando se retira o pacote do forno. Verificar cuidadosamente e, se necessário, colocar a embalagem continuar o aquecimento em intervalos curtos. Verificar se suporta o calor. Se necessário repetir o aquecimento.

Frio: Para o tratamento de distensões, contusões, inflamações articulares, inchaço, dores de cabeça, enxaquecas, problemas de circulação (após consulta de um especialista).

Refrigeração

- Para proteger a capa/forra, manter a embalagem SISSEL® num saco de plástico no frigorífico ou congelador. Retire a embalagem de um pouco tempo antes da sua utilização.

Imagens do Artigo:

