

## 7,5CM X 2M

**Finalidade:** Fitband é um apoio simples e eficaz para fisioterapia, aumento muscular e aptidão física. Utilização em terapia, reabilitação, para tonificação, correção de postura, treino de equilíbrio, consciência corporal, melhoria da flexibilidade. Disponível em 4 resistências, 2 larguras e 6 comprimentos para exercícios progressivos de resistência e aplicações ajustadas individualmente, também com clipe para ajuste seguro e flexível do comprimento.

**Características:**

Produto natural feito de borracha pura com comportamento de resistência linear fiável.

**Medida:** 7,5 cm x 2m

**Cor:** Amarelo – 163.005  
Vermelho – 163.006  
Verde – 163.007  
Azul – 163.008

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Regulamento:** (EU) 2017/745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** 163.005 , 163.006, 163.007, 163.008

**Marca:** SISSEL

**Declaração de conformidade:** (EU) 2017/745

**Fabricante:** SISSEL GmbH

**Morada do fabricante:**

Bruchstr. 48 - 67098 Bad Dürkheim Deutschland  
(Alemanha)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão  
Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-  
357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:**

Requer apenas um mínimo de pó. Se estiver sujo, lavar a faixa com água limpa, secar ao ar e pulverizar ligeiramente apenas quando necessário. Não expor à luz solar direta, manter afastado de objetos cortantes.

**Instruções de Utilização:**

Ao utilizar Fitbands, siga sempre as recomendações do seu médico ou terapeuta. As crianças só podem utilizar a banda sob a supervisão de um adulto e após uma terapia de acompanhamento de introdução. Não adequado para bebés. Não esticar demasiado a banda, não criar demasiada tensão. Escolher a banda que corresponde a sua condição física e força muscular. Tenha cuidado com os exercícios à altura da cabeça! Afaste-se dos olhos, a banda pode escorregar para fora de mão ou suporte e estalar na cara! Assegurar-se de que a faixa não pode soltar-se da moldura da porta ou soltar-se da cadeira ou de outros objetos.

**Imagens do Artigo:**