

Finalidade: Fitband é um apoio simples e eficaz para fisioterapia, aumento muscular e aptidão física. Utilização em terapia, reabilitação, para tonificação, correção de postura, treino de equilíbrio, consciência corporal, melhoria da flexibilidade. Disponível em 4 resistências, 2 larguras e 6 comprimentos para exercícios progressivos de resistência e aplicações ajustadas individualmente, também com clipe para ajuste seguro e flexível do comprimento.

Características:

Produto natural feito de borracha pura com comportamento de resistência linear fiável.

Medida: 15 cm x 25cm

Cor: Amarelo (Suave) – 163.101
Vermelho (Médio) – 163.102
Verde (Forte) – 163.103
Azul (Extra forte) – 163.104

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Regulamento: (EU) 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: 163.101 , 163.102, 163.103, 163.104

Marca: SISSEL

Declaração de conformidade: (EU) 2017/745

Fabricante: SISSEL GmbH

Morada do fabricante:

Bruchstr. 48 - 67098 Bad Dürkheim Deutschland
(Alemanha)

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Requer apenas um mínimo de pó. Se estiver sujo, lavar a faixa com água limpa, secar ao ar e pulverizar ligeiramente apenas quando necessário. Não expor à luz solar direta, manter afastado de objetos cortantes.

Instruções de Utilização:

Ao utilizar Fitbands, siga sempre as recomendações do seu médico ou terapeuta. As crianças só podem utilizar a banda sob a supervisão de um adulto e após uma terapia de acompanhamento de introdução. Não adequado para bebés. Não esticar demasiado a banda, não criar demasiada tensão. Escolher a banda que corresponde a sua condição física e força muscular. Tenha cuidado com os exercícios à altura da cabeça! Afaste-se dos olhos, a banda pode escorregar para fora de mão ou suporte e estalar na cara! Assegurar-se de que a faixa não pode soltar-se da moldura da porta ou soltar-se da cadeira ou de outros objetos.

Imagens do Artigo:

