

Finalidade:

Cirurgia de Hallux Valgus

Pós-Cirurgia Joanetes

Calosidades interdigital (Olhos de galinha ou helomas)

Alterações nas unhas

Alinhamento passivo da primeira junção metatarfosofalageal no Hallux Valgus

Separador interdigital e amortecedor, reduz a fricção interdigital, protege o dedo de fixação, facilita o alinhamento digital, previne a formação de calos interdigital

Características:

Separador interdigital de anel duplo, separador funcional feito de silicone extra macio de grau médico, adapta-se á temperatura corporal, e é lavável

Dimensões: M, L

2 cores disponíveis: cinza metal e vermelho metal

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Dispositivo Médico 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: POD308

Marca: Identités

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lavar com água e sabão neutro

Polvilhar com pó talco para garantir a sua durabilidade.

Instruções de utilização:

Colocar o anel no segundo dedo do pé com o separador entre este e o primeiro dedo.

Muito suave e fácil de usar.

O duplo anel ajuda a que o separador se mantenha sempre no sitio certo ao mesmo tempo que evitam que os dedos rocem uns nos outros.

Este produto, graças à sua densidade especial e aos óleos medicinais que contém, suaviza e protege a pele.

Oferece uma proteção em calos, bolhas e fricções interdigitais, diminuindo a fricção e a dor.

Ajuda no alinhamento dos dedos por problemas de unhas encravadas ou no período pós-operatório. Ajuda a que na situação de aparecimento dos joanetes os dedos mais fortes não ocupem o lugar dos mais pequenos.

Imagens do Artigo: