

Finalidade:

A almofada anti-escaras de célula de ar da linha Levitas foi projetada para garantir o equilíbrio do paciente e para o proteger do risco de feridas por pressão e lesões nos tecidos.

As bolhas de ar de PVC permitem manter uma pressão constante dentro da almofada e manter as células suaves em todas as condições ambientais. A zona pélvica fica completamente imersa na almofada, favorecendo uma distribuição de pressão regular.

Características:

Peso máximo do utilizador: 130kg

Almofada: PVC

Capa/Forro: Nylon em PU antiderrapante e estabilizante. Com fecho de correr e duas pegas de apoio. Fixadores de velcro para fixar a cadeira.

Sem latex. Bomba de insuflar e capa/forra incluída.

Cor: Preto

Dimensões: L 46 x P 40cm, altura 6cm

Lote: Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

Data de produção: Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

Caixa: 1 unidade;

Declaração de Conformidade: Diretiva 93/42/CEE;

Classificação: Classe 1;

Modelo: ST852/2

Marca: Levita

Fabricante: Moretti S.P.A.;

Morada do fabricante: Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20022 Cavriglia (Arezzo);

Importador e Distribuidor: Gerimais;

Morada do Importador e Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Para a segurança do paciente e do cuidador, recomendamos que deixe verificar o aparelho pelo fabricante ou por laboratório autorizado de 2 em 2 anos. Em caso de reparação, utilize apenas peças sobressalentes originais e acessórios.

Almofada: Limpe a almofada com água e sabão suave. Limpe a almofada com um pano húmido e enxague com água fria. Seque-a.

Capa: Lavável à mão ou na máquina com detergente neutro (máx. 30°)

Deve ser lavado com água e sabão neutro após uso. Manter longe de luz direta e fontes de calor.

Instruções de Utilização:

- Certifique-se de que a almofada não tem danos que possam comprometer a operação.

- Verifique se a almofada está corretamente insuflada.

- Verifique se qualquer objeto está na almofada antes de ter assento.

1. Abra a válvula no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e ligue a bomba à almofada (a parte que deve rodar é a que está fornecida com a pega).

2. Ligue o tubo da bomba à válvula.

3. Insufle a almofada lentamente. Não exceda a inflação.

4. Feche a válvula da almofada no sentido dos ponteiros do relógio.

5. Retire a bomba da válvula. Se a almofada tiver mais de 1 válvula, repita o processo com outras válvulas.

6. Coloque a almofada na capa/forra.

7. Coloque a almofada na cadeira de rodas. Sente-se na almofada e verifique se a zona pélvica não está em contacto com a base.

8. Verifique se o paciente está afundado na almofada não mais que 1-2 cm. Sugerimos que coloque uma mão entre o paciente e a almofada.

9. Ajuste a pressão para garantir o melhor conforto. Se necessário, esvazie desapertando a válvula e deixe o ar escapar.

Imagens do Artigo: