

Finalidade: Apoio/Ajuda de segurança, na utilização da casa de banho para pessoas com dificuldade motora.

Características: Pega é composta por e ventosas de pressão em pvc.

Peso máximo do utilizador: 55kg (lateral e vertical) e 40 kg (em ângulo)

Cor: Branco e azul

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Marca: Mopedia (Moretti)

Modelo: RS975-36

Dimensões: 36 cm x 17,5 x 3,5 cm

Dimensão da pega – 11 cm

Declaração de conformidade: Diretiva 2007/47

Fabricante: Moretti S.p.A.

Morada do fabricante: Via Bruxelles 3 - Melegnano 20122 Cavriola (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento: Use um pano húmido e sabão suave, em seguida seque bem antes de utilizar. Se for necessário desinfetar, utilize um desinfetante comum.

Nota: Nunca utilize ácidos, alcalinos ou solventes como a acetona.

Instruções de Utilização: Montagem sem furos. Limpe a superfície com álcool e deixe secar, Levante ambas as alavancas e coloque a barra de pressão numa superfície completamente lisa. Segure a extremidade e pressione um alavanca com a palma da mão. A luz verde deve acender. Se ficar vermelha deverá reiniciar o procedimento.

Esta barra de apoio foi concebida para ajudar o seu movimento natural, como quando entra ou sai de um chuveiro. A pega/apoio do banho não foi concebida para manter ou suportar o seu peso corporal total.

Imagens do Artigo:

