
Marquesa dobrável de dois corpos

Modelo ref 40410

CE

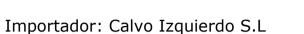

C/de la Forja nº4, 46340

Requena (Valência) Espanha

Montagem da marquesa

Figura 1. Retire a marquesa do saco. Abra os fechos e coloque a marquesa sobre as pernas parcialmente abertas. Retire todos os acessórios do interior.



Figura 2. Abra a marquesa completamente.

Figura 3. O apoio da cabeça está fixado à parte superior da marquesa, nos orifícios correspondentes. Em seguida, pode ajustar facilmente o ângulo e a profundidade.

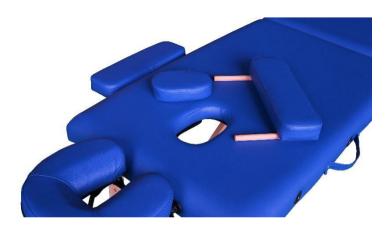


Figura 4. Os apoios laterais encaixam nos buracos laterais dispostos em ambos os lados.



desmontagem

Deixe a marquesa na posição horizontal.

Retire todos os apoios para os braços e o apoio de cabeça.

Coloque a maca na posição lateral. Dobre as pernas e prenda os fechos.