

Marquesa dobrável

Modelos ref. 40401, árbitro. 40402



Montagem da marquesa

Figura 1. Retire a marquesa do saco. Abra os fechos e coloque a marquesa sobre os pés parcialmente abertos. Retire todos os acessórios do interior.



Figura 2. Abra os pés completamente



Importador: B-96497540




Figura 3. O apoio de cabeça é fixo à parte superior da marquesa nos orifícios correspondentes. Em seguida, pode ajustar facilmente o ângulo e a profundidade.



Figura 4. Os apoios laterais encaixam nos buracos laterais dispostos em ambos os lados.



Figura 5. Desbloqueie o fecho do encosto ajustável. Ajuste o ângulo em que pretende colocar o encosto. Pressione um pouco o encosto para se certificar de que está firme antes de ser utilizado. Para baixar o encosto, levante para o ângulo máximo e baixe-o para uma posição horizontal.

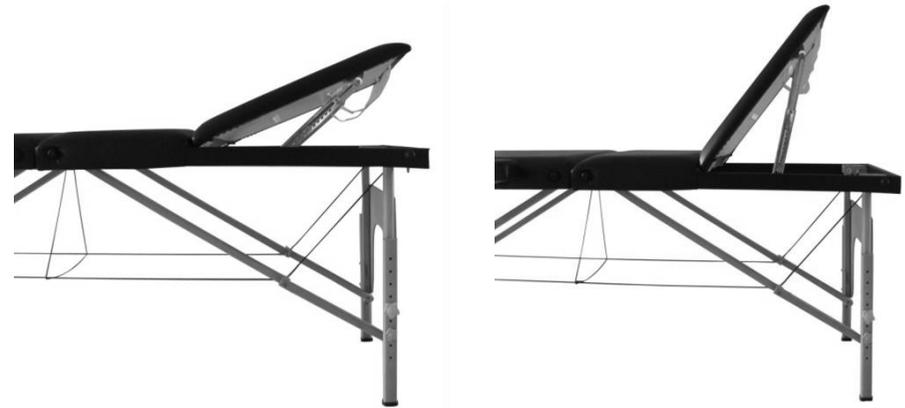

Desmontagem Deixe o apoio ajustável na posição horizontal. Retire os apoios para os braços e os apoios de cabeça.

Coloque a marquesa na posição lateral. Dobre as pernas e prenda os fechos.