

Finalidade: O monitor de tensão arterial de braço é utilizado para medir a pressão arterial e a pulsação. O monitor pode ser usado em hospitais, famílias, escolas e centros médicos. É adequado para adultos, não para recém nascidos.

Características:

1. Medição: Medição oscilográfica
2. Os resultados mostraram: alta pressão / baixa pressão / pulso; Conversão unitária: conversão kPa /mmHg das unidades de tensão arterial (a unidade de padrão é mmHg); Grupo de Memória: Dois conjuntos de memória, cada 99 medições resultados da memória; Função do relógio: Conjunto do ano, mês, dia, hora, minuto; Testes de baixa potência: qualquer estado de trabalho que detete baixa, lcd displays " "símbolo provoca baixa potência ;
3. Ecran LCD
4. Precisão: NIBP - ± 3 mm Hg (± 0.4 kPa); PR - $\pm 5\%$
5. Alimentação: 4 pilhas alcalinas ou alimentador DC6.0V

Peso: 237g

Dimensões: 130,9 x 96,1 x 63,1mm

Dimensão da braçadeira: 22-32 cm

Cor: Branco

Caixa: 1 unidade;

Diretiva 93/42/EEC;

N.º de série e Data de Fabrico: Descritos na Etiqueta do artigo;

Classificação: Classe IIa;

Modelo: YK-BPA1;

Marca: YK

Certificado CE: G1 092582 0009 Rev.00;

Fabricante: China;

Representante Europeu: Alemanha

Distribuidor: Gerimais;

Morada do Distribuidor: Avenida dos Combatentes N.º96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior – qualidade@gerimais.com;

Manutenção: Leia atentamente o Manual do Utilizador. Mantenha o equipamento sempre limpo.

Utilize um pano limpo macio e seco para limpar o equipamento, se estiver muito sujo pode utilizar um pano húmido com detergente neutro para limpar o monitor. Recomenda-se colocar tecido descartável debaixo da manga para reduzir o contacto cruzado e evitar sujar a braçadeira.

Em ambiente hospitalar limpe a braçadeira antes e depois de cada utilização com álcool a 75%.

Não molhe a braçadeira com água nem utilize agentes abrasivos.

Sempre que o equipamento não estiver a ser utilizado durante longos períodos deve remover as pilhas para evitar danos.

Instruções de Utilização:

O Tensímetro pode ser utilizado ou com as pilhas ou com o adaptador. Pode memorizar automaticamente 2 x 99 grupos de valor medido na memória e calcular o valor médio dos últimos três grupos de resultados. Para gravar deve seguir as instruções para efetuar a definição inicial antes da primeira medição. Após a definição inicial coloque a braçadeira corretamente no braço (indicações no manual) e faça a sua medição arterial.

Imagens do Artigo:

