

Finalidade: Ideal para pessoas que não conseguem andar ou com mobilidade fortemente reduzida. Cadeira de rodas manual para transporte ou transferência Modulo light é ideal para transferências diárias em casa ou em instalações.

Características: Possui uma estrutura de alumínio muito robusta com travessas duplas que se adaptam a pessoas até 125 kg. As suas grandes rodas flexíveis (30 cm atrás e 20 cm à frente) permitem passeios ao ar livre com total conforto. Freios de terceira pessoa com travamento automático padrão. Apoios de braços rebatíveis. Cinto de segurança incluído.

3 larguras disponíveis: 42,5 cm, 45 cm e 47,5 cm

Peso: 12,4kg.

Resistência: 125kg.

Dimensões totais: largura. 58,5 / 61 / 63,5 x profundidade 97x alto. 92cm.

Dimensões do assento: largura. 42,5 / 45 / 47,5 x profundidade 41x alto. 49cm. Alto. encosto 43 cm.

Dimensões dobradas (incluindo encosto rebatível): largura. 27 x profundidade 65x alto. 72cm.

Cor: cinza metalizado (disponível também em vermelho metalizado)

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Dispositivo Médico 2017/745

Classificação: Classe I

Modelos:

874006.G (Cinza metalizado) – 42,5cm

874006.R (Vermelho metalizado) – 42,5cm

874007.G (Cinza metalizado) – 45cm

874007.R (Vermelho metalizado) – 45cm

874001.G (Cinza metalizado) - 47,5cm

874001.R (Vermelho metalizado) - 47,5cm

Marca: Identités

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: O produto não tolera a limpeza em máquinas automáticas nem a utilização de equipamento de limpeza de alta pressão ou vapor. A sujidade, a areia e a água do mar podem danificar os rolamentos e as peças de aço podem enferrujar se a superfície estiver danificada.– A cadeira de rodas só deverá ser exposta a areia e a água do mar durante períodos breves e deverá ser limpa após cada ida à praia.– Se a cadeira de rodas estiver suja, limpe a sujidade assim que possível com um pano húmido e seque cuidadosamente. Nunca utilize líquidos corrosivos (alcalinos, ácidos, etc.) ou agentes de limpeza abrasivos. Recomendamos um agente de limpeza doméstico normal, como detergente da loiça, se não houver especificações em contrário nas instruções de limpeza.– Nunca utilize um solvente (diluente celulósico, acetona, etc.) que altere a estrutura do plástico ou dissolva as etiquetas afixadas.– Certifique-se sempre de que o produto está completamente seco antes de o pôr novamente em funcionamento.

Instruções de utilização: Desloque a cadeira de rodas o mais perto possível do assento para o qual pretende transferir o corpo. 2. Aplique os travões de estacionamento. 3. Remova os apoios de braços ou rode-os para cima para desimpedir a saída. 4. Coloque os pés no chão. 5. Segure a cadeira de rodas e, se necessário, apoie-se num objeto fixo na vizinhança. 6. Afaste-se lentamente da cadeira de rodas.

Imagens do Artigo:

