

Finalidade:

Disco de transferência leve e robusto para transferência rotativa em casa, para mover pacientes da cama para cadeira de rodas e vice-versa. Facilita a mobilização em pacientes com mobilidade reduzida, evitando que os pés tropecem. Se têm pouca força e pouca mobilidade nas pernas e têm dificuldade nas pequenas transferências, ou se a pessoa de quem é cuidador apresenta estas dificuldades, pode optar pela utilização de um disco giratório de transferência. Os pés apoiam-se no disco, que gira 360º, o que vai minimizar o esforço da transferência, quer da pessoa se efetuar a transferência sozinha, quer do cuidador facilitando o girar a quem está a proceder à transferência. Além de facilitar a transferência também oferece comodidade ao utilizador. Facilita a viragem de pessoas quando estão em pé ou sentadas, permitindo a transferência de cama para a cadeira ou vice-versa. É giratório a 360º e faz a rotação para ambas as direções, possibilitando que o cuidador consiga movimentar o paciente com maior facilidade. O uso deste equipamento durante as transferências, vai reduzir a pressão nos joelhos e tornozelos.

Características:

Leve e resistente, gira 360º com facilidade. Diâmetro: 40cm, roda para ambos os sentidos devido as suas dimensões e peso é fácil de arrumar e transportar.

Peso 1kg.

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva:

Classificação:

Modelo: 815163

Marca: Identités

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 – Bd de la Chanterie. 49480 Saint Barthélemy d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Parte superior lavável e antiderrapante. Não use produtos abrasivos; Use detergentes de limpeza comuns; Na desinfeção use produtos adequados para plásticos. Não coloque os botões antiderrapantes em pavimentos escorregadios; Use o disco em pavimentos secos e planos; Não use o disco em pavimentos molhados (por exemplo banheiros).

Instruções de utilização:

Coloque o disco giratório no chão com os botões antiderrapantes virados para baixo; Os pés do utilizador são colocados no disco; O cuidador deve levantar cuidadosamente o utilizador e girar o disco para o lado desejado; Pode sentar o utilizador.

