## CADEIRA DE BANHO MULTIFUNÇÕES RP782



## **COM RODAS**

Finalidade: A cadeira são instrumentos de ajuda para o banho e o duche indicados para pessoas com mobilidade reduzida.

Características: Estrutura Alumínio de anodizado (regulável em altura), assento em PVC e ponteiras em Borracha antiderrapante; Funções: Alteador de sanita, suporte para sanita, cadeira confortável e assento para duche.

Cor: Cinzento e alumínio;

Data de produção e Lote: Referido no artigo;

Embalagem: 1 unidade;

Diretiva 93/42/EEC;

Classificação: Classe I;

Modelo: RP782;

Marca: Moretti;

Dimensões: Base: 50x43cm; altura do assento 47 a 57cm, altura dos apoios: 64 -

74cm

Peso Máximo de utilizador: 130kg;

Fabricante: Moretti S.P.A;

Morada do fabricante: Via Bruxelles, 3 -

Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo);

Importador e Distribuidor: Gerimais;

Morada do Importador e Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR -

qualidade@gerimais.com.

Manutenção e Limpeza: Os dispositivos da linha MOPEDIA by Moretti, na altura da sua colocação no mercado, são cuidadosamente examinados e marcados com a marca CE. Para a segurança do paciente e do médico, recomenda-se mandar controlar a aptidão ao uso do seu produto ao fabricante ou a um laboratório autorizado, pelo menos de dois em dois anos. Para limpar utilize água morna e um sabão neutro. Segue com um pano.

Não utilizar substâncias abrasivas, ácidos, álcool, detergentes à base de cloro, desinfetantes e acetona, porque estas substâncias provocam a abrasão das superfícies metálicas;

Instruções de Utilização: Ao sentar-se, distribua sempre o peso por todo o assento. Não se sente carregando o peso só de um lado. Para se levantar e manter o equilíbrio, apoie-se sempre em ambos os apoios de braços.

No caso de utilização da cadeira por pessoas com deficiências motoras particulares, ajudá-las sempre a sentar e levantar.

## **Imagens do Artigo:**



