

2 RODAS C/ASSENTO

Finalidade: Este andarilho serve para pessoas com problemas de mobilidade.

Características: 2 rodas dianteiras e 2 pontas traseiras. Pegas anatómicas ajustáveis em altura e máximo conforto. Facilmente dobrável para armazenamento e transporte. Peso máximo de carga: 136 kg;

Data de inspeção: (Quando Aplicável)

Lote: Ver embalagem

Cor: Azul e preto

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: RP680

Marca: Zeus

Dimensões: Largura: 61cm ; Altura: 74 a 94 cm ; Medida entre ponteira: 61cm; Medida entre pegas: 36,5 cm. Medida quando fechada: 24 cm x 15cm. Peso: 6kg

Declaração de Conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: Moretti S.p.A.

Morada do fabricante: Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão
Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-
357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: É recomendado que seja verificado pelo fabricante ou por um laboratório aprovado, pelo menos de 2 em 2 anos, a adequação à utilização do seu andarilho. Se as reparações forem utilizadas apenas peças sobressalentes originais e acessórios.

Instruções de Utilização: Desembale o produto e verifique se não ocorreram danos durante o transporte. No caso de o andarilho estar danificado, contacte o revendedor mais próximo. Antes de sentar, coloque o andarilho sobre uma superfície plana e sólida e, em seguida, bloqueie os travões. Certifique-se de que os travões estão bem bloqueados e que o andarilho está numa posição estável.

Imagens do Artigo:

