

Finalidade: NEW ASPIRET é um Aspirador Cirúrgico portátil, concebido para aspirar fluidos corporais em adultos e crianças. É adequado para a aspiração nasal, oral e traqueal, de muco, catarro ou sangue, após pequenas cirurgias e pode ser utilizado em terapias pós-operatórias que se desenvolvam em casa ou poderá ser confortavelmente transportado de um hospital para o outro. Facilmente transportável e concebido para uso contínuo.

Características: É constituído por materiais plásticos, resistentes ao calor e com isolamento elétrico, em conformidade com as mais recentes normas de segurança Europeias. NEW ASPIRET está equipado com um regulador de aspiração no painel frontal e um reservatório completo, autoclavável, em policarbonato com válvula de descarga. Voltagem: 230 V ~ / 50 Hz; Consumo: 110 VA; Fusível: F 1 x 1.6A L 250 V; Pressão máxima de sucção (sem reservatório): -75kPa (-0.75 Bar). REGULÁVEL DE -75kPa (-0.75bar) ATÉ -10kPa (-0.10 bar); Fluxo máximo (sem reservatório): 15 L/min; Peso: 2,2 Kg; Ciclo de funcionamento: Funcionamento Non-Stop.

Dimensões: 25 x 19 x 16 cm

Cor: Branco e azul

Diretiva: 93/42/CEE

Classificação: Classe IIa

Modelo: New aspired 310001

Certificado: Declaração de Conformidade

Fabricante: CA-MI srl

Morada do fabricante:

Via Ugo La Malfa 13 – 43010 Pilastro (Pr) – 43013 Langhirano (PARMA) - Itália

Vendite@ca-mi.it; export@ca-mi.it

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Conservar e utilizar o aparelho em ambientes protegidos contra os agentes atmosféricos e distante de eventuais fontes de calor; após cada utilização, aconselha-se repor o dispositivo na sua caixa, protegido contra o pó e a luz solar; O dispositivo médico exige atenção especial em termos de compatibilidade eletromagnética e deve ser instalado e utilizado de acordo com as informações fornecidas com os documentos anexados: o dispositivo New Aspiret deve ser instalado e utilizado distante de aparelhos de comunicação de radiofrequência móveis e portáteis (telemóveis, transmissores-recetores, etc.), que podem interferir com o dispositivo. Para limpar as partes externas do dispositivo use sempre um tecido de algodão humedecido com detergente. Não aplique detergentes abrasivos ou solventes.

Instruções de Utilização:

Ler atentamente o manual de Instruções.

Coloque o dispositivo em superfícies planas e estáveis. Posicione o dispositivo de forma a evitar que as entradas de ar situadas na parte de trás fiquem obstruídas. Nunca utilize o dispositivo em ambientes que tenham misturas de anestésicos inflamáveis com o ar, oxigénio ou óxido nítrico.

Imagens do Artigo:

