

Finalidade:

O EOLO é um compressor eléctrico com um atomizador para terapias através de aerossol. A tecnologia do compressor com pistão pneumático que equipa este dispositivo, assegura um elevado desempenho e fiabilidade, independentemente das drogas que sejam administradas por aerossol (ex: broncodilatadores e antibióticos).

Características:

O produto e as suas peças são biocompatíveis, de acordo com os requisitos da norma EN 60601-1. Alimentação: 230V ~ / 50 Hz; Consumo: 170VA; Fusível: F 1 x 1.6A L 250V; Pressão máxima: 250 kPa (2.5 Bar); Fluxo máximo de Ar: 14 l/ min; Pressão em funcionamento: 110 kPa (1.10 Bar); Fluxo de ar em funcionamento: 5.0 l/min a 110kPa; Nível Nebulização (com solução de 4ml de 0.9% NaCl): 0.40 ml/min com 4ml de solução de 0.9% NaCl; MMAD: 2.44 µm; GSD: 2,87; Peso: 1,65 Kg; Nível Ruído (medido segundo as especificações da EN 13544-1): Aprox. 55dB (A); Ciclo de operabilidade (até 35°C e 110% voltagem): Funcionamento Non-Stop; Capac. Mínima do Nebulizador: 2 ml; Capac. Máxima do Nebulizador: 6 ml.

Dimensões: 148 x 223 x 124 mm

Cor: Branco

Diretiva: 93/42/CEE

Classificação: Classe IIa

Modelo: Nebulizador de piston Eolo

Certificado: Declaração de Conformidade

Fabricante: CA-MI srl

Morada do fabricante:

Via Ugo La Malfa 13 – 43010 Pilastro (Pr) – 43013 Langhirano (PARMA) - Itália

Vendite@ca-mi.it; export@ca-mi.it

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Avenida dos Combatentes N. 96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Use um pano seco, não abrasivo e sem detergentes solventes. A ficha do cabo de alimentação deverá estar desconectada da tomada antes de proceder a qualquer tipo de limpeza. Antes de cada utilização e / ou após as operações de limpeza, prestar atenção especial à integridade de todos os acessórios fornecidos com o dispositivo. Desligar o aparelho antes de qualquer operação de limpeza e desconectar o cabo de alimentação da tomada eléctrica.

Instruções de Utilização:**Ler atentamente o manual de Instruções.**

Para cada paciente recomenda-se a utilização do nebulizador por 6 meses ou pelo período máximo de 120 tratamentos. O nebulizador deverá ser substituído após um longo período de inatividade, se estiver deformado ou partido, ou se a agulheta/bocal estiver bloqueado por resíduos secos de medicamentos, pó, etc.

Imagens do Artigo: