

**Finalidade:** São auxiliares manuseados por um braço, adequados para apoiar e / ou auxiliar a mobilidade de pessoas com dificuldades de locomoção;

**Características:** São fabricados em alumínio anodizado, possuem cabo anatômico e pontas de borracha antiderrapante;

**Lote:** Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

**Data de produção:** Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

**Cor:** Cinzento;

**Caixa:** 1 unidade;

**Declaração de Conformidade:** Diretiva 93/42/CEE;

**Classificação:** Classe 1;

**Modelo:** RP723;

**Marca:** Mopedia (Moretti);

**Dimensões:** 31x26x25;

**Fabricante:** Moretti S.P.A.;

**Morada do fabricante:** Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo);

**Importador e Distribuidor:** Gerimais;

**Morada do Importador e Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:** Use apenas um pano húmido para remover a poeira, use um pano húmido com sabão neutro para remover a sujeira teimosa. Seque bem antes de usar; Se for necessário desinfetar o produto, use um detergente desinfetante comum;

#### Instruções de Utilização:

1. Segure o dispositivo com a mão oposta à perna fraca e com o lado mais comprido do berço voltado para dentro;
2. Traga o dispositivo para frente junto com o pé da perna fraca, colocando todo o peso na perna mais forte;
3. Ao caminhar, tome cuidado para não colocar o dispositivo muito próximo ao corpo para evitar tropeçar em uma das pontas ou muito longe para evitar desequilíbrio;
4. No caso de utilização em escadas, verifique se as dimensões do degrau são suficientes para conter a base do aparelho.

#### Imagens do Artigo:

