

Finalidade: Máscara reanimadora. Projetado para caber sobre a boca e o nariz para administrar oxigénio.

Características: Material PVC

Data de inspeção: (Quando Aplicável)

Lote: Ver embalagem

Cor: Azul translúcido

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe IIa

Modelo: RA444

Marca: Easyred

Dimensões:

Certificado CE: 10000368141-PA-NA-TWN

Fabricante: Moretti S.p.A.

Morada do fabricante: Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão
Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-
357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Armazenar em limpar seco condições, manter longe De calor e luz. Fazer não reutilizar único paciente usar dispositivo Para prevenir cruz Infecção Fazer não mergulhar, enxaguar, lavar ou esterilizar este produto. Estes procedimentos podem deixar resíduos nocivos o máscara. Destruir depois usar.

Instruções de Utilização:

Ligue a máscara ao circuito de respiração ou ao dispositivo de reanimação e use a máscara sobre o nariz e a boca. Certifique-se de que todas as ligações são compatíveis e encaixam firmemente. Se necessário, prenda a máscara no anel do gancho com a correia da cabeça. Para uma vedação ótima, a almofada de enchimento de ar com válvula de insuflação para ajustar a pressão da braçadeira.

Imagens do Artigo:

