



MÁSCARA DE REANIMAÇÃO

Modelos

RA440	TAMANHO 0	RA443	TAMANHO 3
RA441	TAMANHO 1	RA444	TAMANHO 4
RA442	TAMANHO 2	RA445	TAMANHO 5

Projetado para caber sobre a boca e o nariz para administrar oxigênio. Material:

PVC

Instruções de utilização

Ligue a máscara ao circuito de respiração ou ao dispositivo de reanimação e use a máscara sobre o nariz e a boca. Certifique-se de que todas as ligações são compatíveis e encaixam firmemente. Se necessário, prenda a máscara no anel do gancho com a correia da cabeça. Para uma vedação ótima, a almofada de enchimento de ar com válvula de insuflação para ajustar a pressão da braçadeira.

Precauções

Verificar para claro ar fluxo passagem prior Para usar. Fazer certeza de há é ar fluxo De o máscara, teste para fugas, solto conexão prior Para usar. Monitorresposta do paciente ao tratamento e fazer ajuste, se necessário. Armazenar emlimpar seco condições, manter longe De calor e luz. Fazer não reutilizar único paciente usar dispositivo Para prevenir cruz Infecção Fazer não mergulhar, enxaguar, lavar ou esterilizar este produto. Estes procedimentos podem deixar resíduos nocivos máscara. Destruir depois usar.



Obelis S.A.

Boulevard Général Wahis 53
1030 Bruxelas, Bélgica

Headstar Medical Products Co., Ltd.

91, n° 288, Sec. 2, New Taipei Blvd.,
Xinzhuang Dist., New Taipei City, Taiwan,
R.O.C www.headstarmedical.com



Distrib. Moretti S.P.A.
Cavriglia (AR) - Itália
www.morettispa.com