

Finalidade:

As almofadas Anti Escaras, previnem o aparecimento de úlceras de pressão, que surgem devido à permanência do corpo na mesma posição durante longos períodos de tempo. As úlceras de pressão, surgem principalmente em zonas de proeminências ósseas e pontos de apoio do corpo, como calcanhares, glúteos, ombros, joelhos, cotovelos e bacia. A pressão excessiva sobre um ponto do corpo, limita o aporte de sangue a essa mesma zona e consequentemente de oxigénio, originando vermelhidão, destruição da derme/epiderme e consequentemente feridas superficiais e/ou profundas.

Indicação:

Almofada de conforto e Prevenção de escaras. Risco Médio/Elevado

Composição: Espuma Viscoelástica de alta densidade

Peso máximo: Utentes até 90 kg

Dimensões: 42x42x8 cm

Lote: Ver embalagem

Cor: Preto

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: EV800 (EvoVisco)

Marca: Evoluxion

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: N.Y.T. Technology Co. Ltd. Building 1, Group, Tangfang Village, Jiangsu. China.

Importador:

Evoluxion Health, Lda.

Rua Hermano Neves, 18 - 3º Piso - E7

1600-477 Lisboa, Portugal

info@evoluxionhealth.com

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona

Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR -

qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Capa: Todas as almofadas trazem uma capa removível, que permite a sua lavagem. Esta pode ser lavada à mão com água fria, utilizando produtos não abrasivos ou pode ser lavada na máquina, utilizando um programa para roupa delicada, a frio e sem centrifugação. Recomenda-se a utilização de uma rede de proteção de forma a evitar a deformação da capa durante a lavagem. Não usar lixívia; Não passar a ferro.

Núcleo da Almofada: Bloco de espuma Viscoelástica
Não molhar.

Armazenar a almofada preferencialmente na horizontal, evitando a exposição solar e humidade.

Instruções de Utilização: Adaptada a diferentes tipos de assentos, o que permite utilizar tanto em cadeira de rodas, como para assentos convencionais, tais como, sofás, cadeiras, bancos, etc. Posicionar a almofada sobre uma base plana. Escovar ou sacudir periodicamente a capa de fibra para manter a almofada em condições ótimas.

Imagens do Artigo: