

Finalidade (Indicações):

Luxação congênita do quadril. Redução não forçada da displasia do quadril. Quadris deslocados ou instáveis durante os primeiros meses de vida do bebê. Subluxações devido a outros tratamentos ortopédicos ou cirúrgicos.

Mantém a cabeça do fêmur centrada no acetábulo, a 60º de abdução e 90º de flexão, promovendo o desenvolvimento ósseo normal.

A posição de flexão, abdução rotação externa aumenta a cobertura do acetábulo sobre a cabeça do fêmur, permitindo maior estabilidade e congruência.

Patologias/lesões

DISPLASIA , luxação do quadril

Características

Fabricado em termoplástico acolchoado.

Máximo conforto: forrado com tecido felpudo macio.

Simple: ajusta-se e adapta-se por meio de velcro em qualquer parte das almofadas.

Dimensões:

XS, S, M, L, XG

DISTÂNCIA EM CM ENTRE OS JOELHOS EM POSIÇÃO DE ABDUÇÃO. S 18-22CM, M 22-26CM, L 26-32CM, XL 32-37CM, XXL 37-45CM

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: HIP500

Marca: EMO

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lavar com água morna (máximo 30 graus) e sabão neutro. Durante a lavagem, deve manter os velcros juntos ou mantê-los fechado. Secar á temperatura ambiente. Não utilizar o ferro. Contacto com pomadas, cremes, álcool e solventes podem danificar a peça de roupa.

Instruções de utilização:

A peça deve ser ajustada pelo protesista ou o médico individualmente para cada paciente. Coloque o bebé em supino, elevar os pés pra delizar a bandeja abaixo. Abraçando as coxas com almofadas e correcção. Ajuste a área abdominal.

Imagens do Artigo: