

## CHERRY

**Finalidade:** Estas almofadas têm um enchimento de caroço de cereja. Hoje, estes produtos são utilizados devido à sua durabilidade e reutilização. O calor que emana, depois de quente, é importante para a terapia, por ser ligeiramente húmido. O enchimento das almofadas SISSEL® é abundante e por isso conserva o calor e o frio durante mais tempo.

**Características:** Enchimento de caroço de cereja, capa de algodão

**Medida:** 23 x 26 cm

**Cor:** 150.005 - Azul; 150.006 - Flor de cerejeira; 150.014 – padrão de cerejas

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Regulamento:** (EU) 2017/745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** 150.005; 150.006; 150.014

**Marca:** SISSEL

**Declaração de conformidade:** (EU) 2017/745

**Fabricante:** SISSEL GmbH

**Morada do fabricante:**

Bruchstr. 48 67098 Bad Dürkheim Deutschland (Alemanha)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:**

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:**

Nunca deixar o saco a aquecer no microondas ou forno sem supervisão. Guardar longe da luz solar e quando não está a uso guardar num local seco e escuro.

**Instruções de Utilização:**

Quente: Ideal para relaxamento muscular, antes de uma massagem ou de fisioterapia. Como remédio caseiro, contra dores nas costas, tensões na nuca/pescoço, prisão de ventre, desconforto e perturbações menstruais.

**Continuação ...Instruções de Utilização:**

Para alívio, do desconforto reumático (após consulta de um especialista). Aquecimento

- Aquecimento no microondas: Como alternativa às instruções de embalagem, recomendamos o seguinte.

Aquecer a embalagem durante 60 segundos a 600 Watt. Retirar do micro-ondas e verificar a temperatura. Se é necessário mais aquecimento, virar o pacote e sacudi-lo, depois aquecer por mais 20 segundos. Verificar novamente e, se necessário, repetir até se atingir a temperatura desejada. Assegurar-se de que a placa de microondas está limpa e sem qualquer resíduo, a fim de evitar queimaduras no material.

- Aquecimento no forno: Envolver a embalagem em folha de alumínio e aquecer durante 4 - 8 minutos a 70 - 100°C. Tenha cuidado quando se retira o pacote do forno. Verificar cuidadosamente e, se necessário, colocar a embalagem continuar o aquecimento em intervalos curtos. Verificar se suporta o calor. Se necessário repetir o aquecimento.

Frio: Para o tratamento de distinções, contusões, inflamações articulares, inchaço, dores de cabeça, enxaquecas, problemas de circulação (após consulta de um especialista).

Refrigeração

- Para proteger a capa/forra, manter a embalagem SISSEL® num saco de plástico no frigorífico ou congelador. Retire a embalagem de um pouco tempo antes da sua utilização.

**Imagens do Artigo:**

