

Finalidade: Estas almofadas têm um enchimento de caroço de cereja. Hoje, estes produtos são utilizados devido à sua durabilidade e reutilização. O calor que emana, depois de quente, é importante para a terapia, por ser ligeiramente húmido. O enchimento das almofadas SISSEL® é abundante e por isso conserva o calor e o frio durante mais tempo.

Características: Enchimento de caroço de cereja, capa de algodão

Medida: 20 x 40 cm

Cor: 150.016 - Azul; 150.019 - Vermelho

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Regulamento: (EU) 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: 150.016; 150.019

Marca: SISSEL

Declaração de conformidade: (EU) 2017/745

Fabricante: SISSEL GmbH

Morada do fabricante:

Bruchstr. 48 67098 Bad Dürkheim Deutschland
(Alemanha)

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona
Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR -
qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Nunca deixar o saco a aquecer no microondas ou forno sem supervisão. Guardar longe da luz solar e quando não está a uso guardar num local seco e escuro.

Instruções de Utilização:

Quente: Ideal para relaxamento muscular, antes de uma massagem ou de fisioterapia. Como remédio caseiro, contra dores nas costas, tensões na nuca/pescoço, prisão de ventre, desconforto e perturbações menstruais. Para alívio, do desconforto reumático (após consulta de um especialista).

Frio: Para o tratamento de distinções, contusões, inflamações articulares, inchaço, dores de cabeça, enxaquecas, problemas de circulação (após consulta de um especialista).

Imagens do Artigo:

