

Finalidades: Esta Ortótese provoca uma compressão abdominal, limitando o movimento da zona lombar. Indicado em casos de atitudes cifóticas incorretas, encunhamento vertebral, traumatismos dorso lombares, lesões infecciosas que afetem a coluna dorsal, hérnias discais, pós-operatório, osteoporose, fraturas vertebrais e em casos em que haja a necessidade de uma correção da curva cifótica. Lumbárgica; Dorsálgica; Espondilolistese; Degeneração discal; Fraturas vertebrais do corpo; Osteoporose e Postsurgical. Algumas dorsalgias ligeiras como T-8, T-12, associadas a uma lombalgia que necessitem de uma imobilização temporária, (como o paciente deslocar-se, esforços domésticos ou laborais, etc.). Em situações em que há necessidade de uma contenção parcial torácica durante algumas das atividades que o paciente possa ter durante o dia.

Características: Fabricado em tecido respirável. Estrutura rígida e maleável de alumínio para uma adaptação perfeita e fácil. A Estrutura paravertebral estende-se até às primeiras vértebras torácicas. Suporte abdominal têxtil com correias de ajustamento

Cores: Beje

Dimensões:

S, M, L, XL

CIRCUNFERÊNCIA DO TRONCO EM CM. S (85-95), M (95-105), L (105-115), XL (115-125)

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: CDL508

Marca: EMO

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia), Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Lave com um pano húmido e sabão neutro. Durante a lavagem, os velcros deverão estar colados e mantidos fechados. Secar á temperatura ambiente. Não expor a ortótese diretamente a uma fonte de calor direto. Guardar em temperatura ambiente. O contacto com as pomadas, cremes, álcoois e solventes, podem danificar a peça de vestuário.

Instruções de utilização: Ajuste de velcro, confortável e fácil de ajustar, o sistema inovador de 3 tiras deslizantes multiplica a força de tração, facilitando ao paciente o ajuste e a adaptação. O sistema de fecho e a fixação das cinta escapulo axilares por velcro. Leveza e funcionalidade

Precauções:

A peça de vestuário deve ser utilizada estritamente como dirigido pelo médico ou técnico. O material utilizado é hipoalérgico, mas se qualquer reação alérgica ou irritação ocorrer, remover o produto e consultar o médico que prescreveu.

Imagens do Artigo:

