

Tábua de transferência Ergo Gliss dobrável

Ref 825015

Manual do utilizador



Atenção

- 1- 1- É aconselhável realizar estas transferências com enfermeiros ou outras pessoas medicamente qualificadas
- 2- 2- São recomendadas duas pessoas para assistir e realizar a transferência do paciente.
- 3- 3- Realizar a transferência suavemente e sem movimentos bruscos

Utilização

- 1- 1- Ao transferir o doente:
 - 2- - A primeira pessoa apoia o doente pelo ombro e pela pélvis e ajuda-o a virar-se para a posição lateral na cama.
 - 3- - A segunda pessoa coloca o Ergo Gliss debaixo do paciente.
 - 4- - Uma vez o paciente posicionado com segurança sobre o Ergo Gliss, o paciente pode ser movido e transferido.
 - 5- - Assim que a transferência estiver completa, devolver o paciente à posição lateral para que o Ergo Gliss possa ser removido.
- 6- 2- Se existir um espaço entre a cama e o suporte onde o paciente será transferido (15cm no máximo), proteja e facilite a transferência do paciente utilizando o lençol da cama: coloque o Ergo Gliss SUBIR o lençol e proceda com a transferência do paciente.



Manutenção e esterilização

- - O Ergo Gliss pode ser limpo com panos molhados.
- - A cobertura do Ergo Gliss pode ser limpa em água quente e esterilizada com qualquer anti-séptico sem risco de alteração.

Informação útil

O Ergo Gliss pode ser utilizado para exames de raio-X.