

**Finalidade:**

Este bidé amovível permite-lhe transformar a sua sanita num bidé. Ideal para uma higiene perfeita, é simplesmente colocada em cima da sanita existente. Está equipado com um espaço para colocar o sabonete. Especialmente recomendado para adultos, grávidas, crianças ou pessoas com mobilidades reduzidas. Indicado para: Menstruação dolorosa, problemas na bexiga, cólicas intestinais, distúrbios abdominais, hemorroidas. Não é aconselhado em caso de: Distúrbio cognitivo, perda de equilíbrio, localização comprometida e alergias.

**Características:**

Material em 100% Polipropileno (PVC Branco)

Peso: 350 gr.

Capacidade para 3 Litros

Peso máximo do utilizador: 130 Kg

**Cor:** Branco

**Dimensões:** Comprimento 38,5 cm de largura 36,5 cm x altura 12 cm.

**Modelo:** 811054

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:**

**Classificação:**

**Declaração de conformidade:**

**Fabricante:** Herdegen Sas - France

**Fornecedor:** Identités

**Morada do fornecedor:** ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - [www.identites.eu](http://www.identites.eu)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:**

38,5X36,5X12CM

**Instruções de utilização:**

Bidé universal de instalação prática, basta fixa-lo sobre a sanita convencional. As bordas sustentam-no e dão equilíbrio ao utilizador, enquanto permanece sentado. Preencha o bidé até meio com água suave. Tenha cuidado para evitar queimaduras. Levante o assento e a tampa da sanita e posicione o bidé portátil com os lábios externos, resistentes, no bordo da sanita, coloque o prato de sabão para a frente. Coloque o bidé usando o bico na parte de trás do produto.

**Imagens do Artigo:**