



The natural way of sitting.

SISSEL® SPECIAL 2 IN 1

MANUAL DE INSTRUÇÕES



SISSEL® Especial 2 em 1

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Almofada de assento agronomicamente correta e confortável que oferece alívio especial contra a pressão sobre o sacro e o cóccix.

Função/Indicações:

A almofada multifuncional e ergonómica SISSEL® 2 em 1 foi concebida para reabilitação, fisioterapia e em casa.

É útil para várias indicações médicas.

É um instrumento ideal para o tratamento, atenuação e prevenção de dor na região lombar e desequilíbrio muscular devido a postura incorreta.

Podem também ser utilizados em reabilitação, treino de equilíbrio e exercícios de gravidez (as aplicações terapêuticas só devem ser realizadas sob a supervisão ou controlo de profissionais).

A cunha do assento é uma ajuda para simplesmente corrigir a posição sentada, fornecendo uma superfície inclinada que coloca os joelhos debaixo da pélvis.

Nesta posição, é possível corrigir uma vasta gama de problemas posturais e aliviar a pressão sobre a coluna vertebral e os discos intervertebrais.

O desenho especial apresenta uma ponte central que assegura que as pernas permanecem ligeiramente afastadas, o que tem um efeito positivo na posição sentada.

As duas tomadas das nádegas melhoram a ergonomia. A utilização da almofada é muito agradável devido ao material e a base antiderrapante que asseguram a estabilidade.

A almofada Sissel 2 em 1 tem um encaixe para o cóccix. Isto torna o produto ideal para utilização após cirurgia (sacro ou cóccix) e para pacientes após uma operação (no sacro ou cóccix) e para pacientes sujeitos a uma pressão considerável ou sensíveis à dor nestas áreas (anomalias anatómicas do cóccix, anatómicas ou sensíveis à dor nestas áreas (anomalias anatómicas do cóccix, etc.).

Contra-indicações:

Não adequado para pacientes que não cumprem as instruções terapêuticas e pacientes que sofrem de doenças ou sintomas médicos inexplicáveis, pacientes com fracturas vertebrais instáveis ou sintomas clinicamente inexplicáveis, pacientes com fracturas instáveis da coluna vertebral ou da pélvis, etc.

Utilização:

Para uso diário como assento numa superfície estável, ou seja, em cadeiras, bancos, bancadas. Não para utilização em bancos de superfície macia, tais como poltrona ou sofá. Como um assento dinâmico sob supervisão directa ou independente, desde que as instruções de um profissional sejam seguidas de um profissional.

Materiais e manutenção:

Materiais: espuma de poliuretano com um recorte feito de espuma viscoelástica. Apenas lavagem manual. Secar ao ar, não secar em radiadores ou sob luz solar directa (risco de descoloração).

Capa: poliéster com superfície em PVC antiderrapante, lavável à máquina a 40 graus, por favor siga as instruções na etiqueta e as instruções no rótulo.

Armazenamento: O recheio pode desvanecer-se (cor amarelada) se for exposto à luz solar directa sem a cobertura, mas mantém a sua função.




El principio efectivo de una cuña de asiento

1 sin cuña de asiento:

No es fácil sentarse correctamente, existe la tendencia de encorvarse

2 Con una cuña SISSEL®:

El cuerpo toma la postura correcta con la pelvis ligeramente hacia adelante sin gran esfuerzo

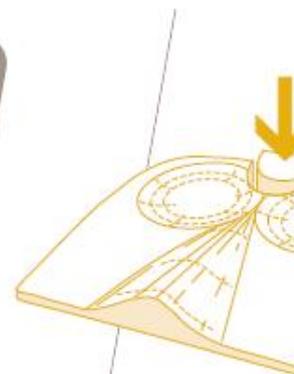

SISSEL® GmbH · Bruchstrasse 48 · D-67098 Bad Dürkheim · Germany



nos reservamos errores y de impresión. Son p de coloc material y de construcción sin previo