

Finalidade:

Almofada com enchimento para fornecer calor, permite uma sensação de relaxamento e bem-estar para aliviar as dores musculares e caibras dos mais pequenos. Ajuda e acalma as crianças na hora de adormecer e pode ser usado para tratamentos de calor. As crianças adoram abraçar estes amiguinhos e desfrutar do calor agradável.

Características:

Composição da almofada/forma de animal: 73% Polyester e 27%Algodão

Composição do enchimento (interior da almofada): Carços de cereja, Grainha de uva, Perolas de silicone, grânulos de cerâmica e sementes de colza.

Dimensões: 32 x 17 cm

Cor: Azul

Modelo:

861214 – Baleia Azul

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Classificação:

Marca: Identités

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

- Guardar em local seco
- Evitar exposição solar direta
- Não lavar o enchimento, se necessário limpar com um pano húmido.
- Se tiver capa, pode ser lavada de acordo com as instruções na etiqueta.
- Por razões de higiene o artigo deve ser substituído após 3 anos da data de compra.

Instruções de utilização: O artigo pode sofrer danos por sobreaquecimento. Não utilizar se danificado. Aquecer no micro-ondas sempre com um copo de água meio cheio. Se o artigo tiver uma capa, deve ser removida antes do aquecimento. Não aquecer o artigo na função grill ou dentro de um recipiente com água. Nunca colocar um objeto de metal durante o aquecimento.

- 1-Distenda o artigo de forma plana no micro-ondas, e o enchimento de forma uniforme.
- 2-Utilize o micro-ondas de acordo com as instruções na etiqueta do produto.
- 3-Depois de aquecer, manuseie o artigo para uniformizar a temperatura.
- 4-Teste a temperatura no seu antebraço
- 5-Se a temperatura não for suficiente, repita os passos 1 a 4
- 6-Se a temperatura estiver muito quente, arrefeça á temperatura ambiente e verifique se existem danos
- 7-Não utilizar mais de 20 minutos no mesmo ponto do seu corpo.

Imagens do Artigo: