

Finalidade:

Aspirador de Ouidos é um pequeno dispositivo que aspira a cera. Super prático, o aspirador ajuda a libertar um bloqueio que se formou no canal auditivo. Os ouvidos são uma parte muito frágil da nossa anatomia e é por isso muito importante cuidarmos deles. Um bloqueio de cera dos ouvidos raramente é doloroso, mas sempre desagradável. Pode causar comichão e até mesmo prejudicar temporariamente a audição. O aspirador não é para ser utilizado diariamente, mas sim 1 vez por semana (máximo)

Nota: Substitui os cotonetes de algodão que empurram a cera e detritos na orelha, o que pode danificar os tímpanos.

Características:

Particularmente recomendado para pessoas com orelhas sensíveis, suga suavemente a cera dos ouvidos. É um dispositivo seguro. Trabalha com Pilhas, um botão para o ligar e desligar.

Fornecido com 4 adaptadores em silicone, um para cada membro da família e de cores diferentes para que não haja nenhuma confusão e uma Escova para proceder á limpeza do aspirador.

Funciona com 2 pilhas AA com (não incluídas). Certifique-se de que está a colocar as pilhas corretamente, conforme indicado no desenho em relevo na tampa das pilhas. Peso 135 g.

Dimensões:

14 x10 x 6 cm.

Cor: Branco

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Classificação:

Modelo: 819150

Marca: Identités

Fornecedor: Identités

Morada do fornecedor: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

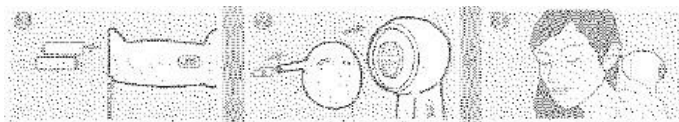
Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior
2040-357 RIO MAIOR
qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lavar a cabeça dos adaptadores de silicone e o filtro apenas com água e sabão neutro. Manter o aspirador limpo e seco, usar um pano seco e macio para limpar no final da limpeza.

Instruções de utilização:

1: Abra a tampa na parte inferior e instale 2 pilhas do tamanho AA (não incluídas), em seguida, feche a tampa. Passo 2: Coloque o protetor de ouvido de silicone no tubo da unidade e certifique-se de que ele está fixado firmemente no tubo. Passo 3: Ligue a unidade e o aspirador deve ligar. Passo 4: Em seguida, insira suavemente o tubo na orelha e gire ligeiramente para tirar qualquer cera de ouvido. Atenção: Deve usar este aspirador em ouvidos saudáveis sem qualquer problema.

**Imagens do Artigo:**