



BENGALA ANATÓMICA DOBRÁVEL
Manual de instruções
DISPOSITIVO MÉDICO

REF. 816077.D – 816077.G





INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

PT

IMPORTANTE

Leia atentamente as instruções antes de utilizar este produto e guarde-as para referência futura.

Utilizador: se não conseguir ler ou compreender os avisos, precauções ou instruções, contacte o seu profissional de saúde ou distribuidor antes de utilizar este produto, sob pena de riscos e danos.

Consulte o seu médico ou profissional de saúde antes de utilizar um dispositivo de auxílio à marcha. Ele irá aconselhá-lo e informá-lo sobre a técnica de marcha mais adequada ao seu caso.

Distribuidor: este folheto deve ser entregue aos utilizadores deste produto.

SÍMBOLO QUE FIGURA NA ETIQUETA OU NO FOLHETO DE UTILIZAÇÃO

	Endereço do fabricante		Convite para consultar o manual de utilização
	Data de fabrico		Respeitar as instruções de segurança
	Número do lote		Conformidade CE
	Referência do produto		Proteger da humidade
	Peso máximo do utilizador		Dispositivo médico

DESTINO DO PRODUTO

As bengalas dobráveis são dispositivos de apoio à marcha destinados a pessoas com mobilidade reduzida. As bengalas são dobráveis, em alumínio e fáceis de transportar.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



O não cumprimento das precauções de utilização pode causar riscos de ferimentos graves.

- Não exceda o limite máximo de peso de 120 kg.
- Utilize apenas os acessórios e peças fornecidos pelo fabricante.
- Verifique visualmente o estado geral do produto (tubo, pega, alça, pé).
- Certifique-se de que os cliques estão bem encaixados para o ajuste da altura antes de cada utilização e que o parafuso antirruído está bem apertado.
- Certifique-se de que todas as peças estejam bem fixadas e em bom estado de funcionamento.
- Não faça nenhum ajuste no produto enquanto ele estiver em uso.
- Apoie-se sempre com a ajuda da pega.
- Em caso de peças danificadas, partidas ou gastas, contacte o revendedor.

MONTAGEM E UTILIZAÇÃO

MONTAGEM

1. Para montar a bengala, encaixe os 3 fechos inferiores nos orifícios e encaixe as 4 partes.
2. Para dobrar a bengala, pressione os 3 fechos inferiores e puxe as 4 partes para separá-las e dobrá-las. Os fechos podem ser um pouco rígidos, para evitar que a bengala se dobre involuntariamente.
3. Para ajustar a altura, pressione o trinco superior, puxe ou empurre a pega para uma das 5 alturas desejadas e deixe o trinco encaixar novamente no orifício correspondente.

UTILIZAÇÃO

Para utilizar o produto, apoie-se na pega. Ajuste a altura, se necessário. Avance suavemente.

MANUTENÇÃO



A falta de manutenção e conservação do seu produto pode causar riscos de ferimentos graves.

- Limpe regularmente o produto com água morna e um pano macio. Não utilize produtos abrasivos, detergentes ou solventes.
- Seque com um pano macio limpo e seco para evitar a oxidação.
- Certifique-se de que não há acúmulo de sujeira ou detritos ao redor das pontas.
- Não utilize produtos de limpeza que contenham fenol ou cloro, pois isso pode danificar os materiais de alumínio e poliamida.
- Verifique periodicamente o desgaste e a solidez de todas as fixações, pega e pé de borracha.
- Verifique antes de cada utilização se a ponta de borracha está em bom estado.
- Verifique antes de cada utilização se os cliques estão bem encaixados para o ajuste em altura e se o parafuso antirruído está bem apertado.
- Em caso de avaria, não repare o produto por conta própria. Consulte um revendedor autorizado.

MUDANÇA DE PROPRIETÁRIO

O produto pode ser reutilizado. Deve primeiro ser limpo e desinfetado, respeitando as instruções de higiene. Ao transferir o andarrilho, lembre-se de entregar todos os documentos técnicos necessários ao novo utilizador. Antes disso, o produto deve ser inspecionado por um especialista autorizado.

RECICLAGEM

Quando o produto se tornar inutilizável e tiver de o deitar fora: contacte o seu revendedor especializado. Se pretender reciclar por conta própria, solicite as diretrizes de eliminação à empresa local de gestão de resíduos.

ARMAZENAMENTO



O não cumprimento das condições de armazenamento pode causar danos ao produto e, consequentemente, riscos de ferimentos graves.

Não armazene o seu produto por um período prolongado perto de uma fonte de calor ou ao sol (por exemplo, atrás de uma janela ou perto de um radiador) ou perto de uma fonte de frio.

Mantenha longe de chamas e fontes de faíscas.

Respeite as condições de arrumação e armazenamento do seu produto.

- Num local seco e temperado
- Proteja o seu produto com uma embalagem contra poeira e corrosão (por exemplo: elementos abrasivos, areia, água do mar, ar salino)
- Armazene todas as peças removidas juntas, no mesmo local (ou identifique-as, se necessário) para evitar misturá-las com outros produtos durante a remontagem.
- Todos os componentes devem ser armazenados sem qualquer carga (não coloque objetos muito pesados sobre os elementos do produto, não prenda nada...).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões totais	Comprimento 75 a 90 cm
Peso	0,335 kg
Carga máxima	120 kg

DURAÇÃO DE UTILIZAÇÃO

A vida útil prevista deste produto é de 5 anos em condições normais de utilização, segurança e manutenção. Após esse período, o produto pode continuar a ser utilizado enquanto estiver em bom estado.

GARANTIA

Este produto tem garantia de dois anos a partir da data de compra pelo utilizador. A IDENTITÉS fornecerá peças de substituição para qualquer peça que se tenha partido devido a um defeito de fabrico, conceção ou material. Contacte o distribuidor onde adquiriu o produto caso necessite de fazer uma reclamação. As avarias resultantes de danos acidentais, utilização indevida, modificações ou desgaste não estão cobertas por esta garantia. Contacte o revendedor onde adquiriu o produto para aplicar a garantia.



Identités – ZA Pole 49
Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'ANJOU



Peso máximo autorizado

Peso massimo consentito

Zulässiges Höchstgewicht

Maximaal toegestaan gewicht

Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος

Maksymalna dopuszczalna waga

120 kg

