

Finalidade: A Bengala anatómica Dobrável é concebida para lhe permitir equilibrar o seu peso ou retirar a carga dos membros inferiores ao andar. Indicado para os utilizadores que necessitam de um apoio extra para realizarem a sua mobilidade diária em segurança. Permite uma marcha segura e confortável de caminhar graças à sua robusta estrutura de alumínio, é também adequada para quem sofre de problemas reumáticos. A pega oferece um bom suporte para a palma da mão, melhorando o conforto, estando disponível para a mão esquerda e para a mão direita.

Indicações: Perda de autonomia devido a distúrbios; Distúrbios de equilíbrio e/ou postura; Problemas de marcha; Programa de reabilitação após uma lesão ou operação.

Características: Estrutura de alumínio leve. Punho confortável para a mão. Entregue com pulseira (alça de mão).

Dimensões:

Dobrado: 30cm

Comprimento: 75 a 90 cm

Peso 0,335 kg

Carga máxima: 120 kg

Cor: Preta

Modelo: 816077.D (direita) / 816077.G (esquerda)

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento UE 2017/745

Classificação: Classe I

Declaração de conformidade: Regulamento UE 2017/745

Marca: Identités

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 – Bd de la Chanterie. 49480 Saint Barthélemy d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior
2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com
Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento: Limpar regularmente com água morna e pano macio. Não utilizar produtos abrasivos, detergentes, solventes ou produtos com fenol ou cloro. Secar com pano limpo e seco. Verificar periodicamente o estado da pega, fixações e pé de borracha. Armazenar num local seco e temperado, protegido da humidade, poeiras, calor, frio, luz solar, chamas e faíscas.

Instruções de utilização:

Montar a bengala encaixando corretamente as quatro partes e os três fechos inferiores. Ajustar a altura para uma das cinco posições, garantindo que o trinco encaixe corretamente. Antes de cada utilização, verificar se os fechos estão bem encaixados, o parafuso antirruído está apertado e todas as peças estão em bom estado. Utilizar apoiando-se sempre na pega e avançar suavemente.

Imagens do Artigo:

