

Finalidade:

Mesa de comer no leito, ideal para tomar refeições. Muito prático graças aos seus pés com rodas que encaixam por baixo da cama ou sofá para melhor ajuste.

Características:

Armazenamento fácil para instituições. Tampo da mesa a 90° e um desenho de base que lhes permite serem armazenados uns ao lado dos outros. O seu desenho anatómico é muito prático. Como o resto do Gama Tasmânia, o tabuleiro pode ser levantado com uma mão sem ativar o macaco.

Esta mesa de cabeceira utiliza um cilindro pneumático de alta pressão para ajustar a altura do tampo da mesa. Não retirar o pino de bloqueio da montagem da coluna antes da sua utilização.

Tampo de MDF moldado

Equipado com 2 rodízios com travões.

Peso: 13,5 kg

Dimensões:

Dimensões da base: largura 82 x profundidade 45 cm.

Largura de passagem: 79 cm.

Dimensões do tampo da mesa: largura 80 x profundidade 39 x altura 79 a 115cm.

Cor: Madeira

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva:

Classificação:

Modelo: 823025

Marca: Identités

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Limpar com um detergente neutro e um pano macio. Não utilizar ácidos ou solventes. Armazenar a mesa de cabeceira num ambiente interior, livre de bolor e pó. Mesa dobrável para armazenamento. Não armazenar numa garagem, adega, telheiro exterior ou qualquer outro lugar que possa estar exposto à humidade.

Instruções de utilização:

Antes da utilização, assegurar-se de que todas as peças estão presentes e em bom estado. Em caso de danos, por favor contacte o seu revendedor. Seguir cuidadosamente as instruções de montagem e assegurar-se de que todos os componentes são devidamente fixados antes de serem utilizados. Colocar a mesa de cama sobre uma superfície clara e retirar a embalagem. Não descartar a embalagem até que a montagem esteja completa. (siga as instruções de montagem no manual que acompanha o artigo)

Imagens do Artigo: