

**Finalidade:**

Este prático calçador de meias proporciona a máxima comodidade e conforto. É ideal para pessoas que têm dificuldade em dobra-se, têm problemas de costas ou dificuldade em mover-se.

**Características:**

O material é em Polipropileno (plástico), e no interior tem um tecido em nylon azul que facilita o deslizamento. A parte exterior é coberta com um pano felpudo não agressivo para evitar danos na meia.

**Dimensões:** 23 x 14cm

**Cor:** Branco e Azul

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Modelo:** 819048

**Marca:** Identités

**Fabricante:** Identités

**Morada do fabricante:** ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - [www.identites.eu](http://www.identites.eu)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:**

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR  
[qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com)

**Manutenção e armazenamento:**

Limpar com um pano húmido. Manter seco.

**Instruções de utilização:**

O calçador de meias é muito fácil de usar: Empurrar a meia até que o fundo toque no fim do calçador da meia, Inserir o pé entre o suporte e a meia, Puxar as fitas para que a meia suba o mais alto possível na perna, por fim só precisa remover o Calçador de meia.

**Imagens do Artigo:**