

**Finalidade:**

Canadianas para crianças é um auxiliar de marcha útil e prático em caso de distúrbios de mobilidade, proporciona um apoio estável e seguro em movimento e limita o risco de quedas. Estrutura leve e colorida para uma melhor adesão das crianças ao seu uso.

**Características:**

Bengalas para tamanhos pequenos com uma pega de conforto e um antebraço em forma de lua crescente. Estrutura de alumínio leve e resistente. O antebraço pode ser ajustado para se adaptar à criança. Punhos macios e ajustáveis. Ponteiros antiderrapantes para maior segurança, particularmente em pisos escorregadios. Indicado para usuários (crianças) de 97 a 137cm. Capacidade de carga 127 kg.

**Dimensões:**

Comprimento da secção das pernas: Extensível de 36 a 53cm

Comprimento da secção do braço: Extensível de 16a22cm

**Cor:** Rosa Choque

**Modelo:** 816054

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:**

**Classificação:**

**Marca:** Identités

**Declaração de conformidade:**

**Fabricante:** Identités

**Morada do fabricante:** ZA Pole 49 – Bd de la Chanterie. 49480 Saint Barthélemy d’Anjou, France - [www.identites.eu](http://www.identites.eu)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior  
2040-357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com)

**Manutenção e armazenamento:**

Usar um pano macio utilizando detergente e água para evitar arranhões. Nunca utilizar solventes para a limpeza. Manter limpo e seco.

**Instruções de utilização:**

A altura das canadianas devem ser ajustadas para se adequar a cada utilizador para segurança e conforto. Para ajustar a altura do punho, usar o botão de pressão na secção da perna da secção do punho. Para ajustar a altura da secção:

- 1 - Apertar os botões
- 2 - Estender ou retrain a secção até à altura desejada.
- 3 - Quando esta altura for atingida, soltar o botão mas continuar a ajustar a secção até que os botões bloqueiem na posição.

**Imagens do Artigo:**