

Finalidade:

Encosto para cama, é uma ótima maneira de permitir a qualquer pessoa sentar-se direito na cama. Com vários ajustes que aumentam ou diminuem o ângulo do encosto.

Características:

O suporte é ajustável em inclinação em 5 posições (de 45 a 60°). Para ser colocado no colchão de uma pessoa acamada. Tecido lavável. Apoio de cabeça pode ser removida da zona frontal do encosto. Não remova completamente o apoio de cabeça do dispositivo.

Dimensões: Largura 60cm x Altura do encosto 55 cm.

Cor: Azul e Branco

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 823039

Marca: Identités

Declaração de conformidade:

Fabricante/Distribuidor: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

O dispositivo deve ser limpo com um pano macio e seco. Manter o dispositivo na sua caixa de armazenamento quando não estiver a ser utilizado.

Instruções de utilização:

Colocar o encosto no colchão. Puxar para cima na parte superior do encosto. Quando o encosto estiver num ângulo confortável, empurrar a barra transversal para um dos sulcos de plástico na base do encosto. Assegurar-se de que o encosto é mantido em posição segura antes de ser utilizado. Para Dobrar o Encosto: Puxar para cima no topo do encosto. Retirar a barra transversal da ranhura e dobrar o encosto para baixo.

Imagens do Artigo: