

**Finalidade:**

Tensiometro de pulso totalmente automático, toma silenciosamente a sua tensão arterial e apresenta-o no grande ecrã LCD. Este dispositivo destina-se a medir a pressão sistólica e diastólica de um adulto.

**Características:**

Método oscilométrico. 2 memórias com 60 leituras cada. Com desligamento automático após inatividade. Ecran LCD. 2 pilhas novas LR03 (AAA) são usadas para fazer cerca de 200 medições se estas forem feitas uma vez por dia numa sala a 23° C. Alimentação: 2 baterias Alcalinas AAA. Desliga após 3 min. de inatividade. Precisão :Pressão :  $\pm 3$ mmHg, ( $\pm 0.4$ kPa) , Pulsação :  $\pm 5\%$

**Dimensões:** 6,2 x 8,2 x 2,9 cm.

**Cor:** Branco

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:**

**Classificação:**

**Modelo:** 861185

**Marca:** Identités

**Declaração de conformidade:**

**Fabricante/Distribuidor:** Identités

**Morada do fabricante:** ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - [www.identites.eu](http://www.identites.eu)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:**

O dispositivo deve ser limpo com um pano macio e seco. Manter o dispositivo na sua caixa de armazenamento quando não estiver a ser utilizado.

**Instruções de utilização:**

1) Arregace a manga. Retire o seu relógio, jóias e qualquer roupa apertada, pois isto pode bloquear o seu fluxo sanguíneo. 2) Envolve o punho directamente à volta da sua pele. Não o aplique ao seu vestuário. Palma para cima, prenda o monitor ao pulso esquerdo e prenda o velcro. 3) A extremidade inferior do punho deve estar ao nível da prega do pulso. 4) Segure a parte inferior do punho e enrole-a à volta do pulso de modo a que fique segura. 5) Se não conseguir colocar a manga no pulso esquerdo, pode fazer a medição no pulso direito.

**Imagens do Artigo:**