

Finalidade: Andarilho com apoio nas axilas com 4 rodas dobrável e ajustável em altura. Andarilho para pessoas com dificuldades motoras com apoios acolchoados.

Características: Peso: 11kg; 4 rodas giratórias, 2 com travão, apoio das axilas acolchoadas. Carga máxima 130kg

Data de inspeção: (Quando Aplicável)

Lote: ver embalagem

Cor: Cinzento metalizado

Data de produção: Ver embalagem

Caixa: 1 unidade

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: RP758S

Marca: Mopedia

Dimensões: ● Altura do apoio opcional: 47 – 61,5 Cm ● Altura sub-axilar: 112 – 140 Cm ● Largura sub-axilar: 30,5 - 66,5 Cm ● Altura da estrutura: 76 – 89,5 Cm ● Altura da barra de suporte: 80,5 – 94,5 Cm

Largura: 48,5 Cm ● Profundidade: 64 cm

Declaração de Conformidade: Diretiva CE 93/42

Fabricante: Moretti S.p.A.

Morada do fabricante: Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Para a segurança do paciente e do médico, recomendamos que deixe verificar o aparelho pelo fabricante ou por laboratório autorizado de 2 em 2 anos. Em caso de reparação, utilize apenas peças sobressalentes originais e acessórios.

Limpeza:

Para limpar utilize um pano húmido com solução de álcool ou sabão neutro (em partes iguais) misturado com água. Não utilizar substâncias abrasivas nem produtos de limpeza á base de cloro, desinfetante ou acetona para fazer a limpeza.

Instruções de Utilização:

Montar o equipamento, seguindo as instruções do manual. Ajustar todas as posições de acordo com o necessário.

O dispositivo proporciona maior estabilidade, suporte e segurança durante a deslocação, no entanto não pode ser usado por pessoas com uma funcionalidade da mão e/ou braço visivelmente fraco e mesmo por pessoas com problemas de equilíbrio. Recomendamos a utilização apenas em superfícies nas quais as quatro pernas toquem no chão. Não deve ser utilizado em terrenos rochosos ou em superfícies inclinadas porque o andarilho pode tornar-se instável. O aparelho não foi concebido para o transporte de pessoas ou outros materiais.

Imagens do Artigo:

