

Finalidade:

Andarilho com rodas e apoio de braços é um auxiliar de mobilidade serve para facilitar a mobilidade de alguém com dificuldade em andar. O andarilho proporciona estabilidade, suporte e segurança durante a deambulação.

Características:

Andarilho dobrável de aço tubular pintado. 4 rodas maciças de Ø 20 cm, rodas dianteiras giratórias e rodas traseiras fixas. Pegas com suporte do antebraço e travões de dupla função.

Pega e assento - polipropileno

Incluídos: assento, bandeja e cesto.

Peso máximo de carga: 136 Kg

Peso: 10Kg

Dimensões: 64 x 60 x 98 -120 cm

Data de inspeção: (Quando Aplicável)

Lote: Ver embalagem

Cor: Cinzento

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: RP691

Marca: Mopedia

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: Moretti S.p.A.

Morada do fabricante: Via Bruxelles 3 - Meleto

52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Limpar apenas com um pano molhado e seque-o com um pano limpo e seco. Utilizar sabão neutro que não danifique os materiais. Lubrificar as rodas periodicamente.

Instruções de Utilização:

Comece a empurrar quando estiver na posição vertical com as duas mãos na pega;

Certifique-se de que as mãos estão secas antes de utilizar o rolo para evitar o risco de escorregar;

Caminhando mantendo uma posição vertical com os olhos virados para a frente e não para baixo; Não empurre o andarilho muito para longe do corpo, isto pode causar quedas e cargas inadequadas; Não utilize o andarilho para ultrapassar passos superiores a 20mm;

Ao utilizar o exterior, prefere as calçadas devidamente preparadas de acordo com os regulamentos de remover as barreiras arquitetónicas

Imagens do Artigo: