

Finalidade:

Faixa Torácica feita com tecido elástico e altamente respirável e elástica que permite distribuir a carga e apoiar a área. Indicado para: Síndrome Costal, Fissuro Costal, Lágrimas Musculares Intercostais, Fratura Rib, Pós- Cirurgia.

Efeitos: Suporte Torácico, controle dos movimentos torácicos, compressão controlada e homogénea, não restringe os movimentos respiratórios e proporciona uma sensação de segurança

Características:

Cinta Elástica com interior em algodão macio, Construção sem costuras para evitar sobrepressão e irritação, enquanto proporciona a máxima suavidade. Espessura mínima devido á sua fixação por micro velcro.
Sem látex: hipoalergénico.

Dimensões:

S , M , L , XL
CONTORNO DE TÓRAX EN CM. S (75-85 CM) , M (85-100 CM) , L (100-112 CM), XL (112-125 CM)

Cor: Bege

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: FJ341

Marca: EMO

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 °) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Secar à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário.

Instruções de utilização:

Agarrar tira nas extremidades com a duas mãos. Colocar a correia sobre a nervura na altura correta para área de utilização. Ajustar e fechar a Faixa através dos velcros existentes, uma vez obtida a compressão desejada.

Imagens do Artigo: