

Finalidade:

Facilita o movimento de agarrar os objetos por parte de pessoas com mobilidade reduzida;

Características:

Pinça e puxador em plástico e haste em alumínio.

Lote: Ver embalagem

Cor: Preto ou azul e cor de Alumínio;

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: AU120/AU121/AU122/AU123

Dimensões: AU120 – 67 cm; AU121 - 55cm; AU122 – 71cm; AU123 - 74cm

Declaração de Conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: Moretti S.p.A.

Morada do fabricante: Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR -
qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Só devem ser utilizadas peças sobressalentes originais. Para limpar o produto, utilize apenas um pano húmido e sabão neutro. Se for necessário efetuar a desinfeção do produto, utilize um detergente desinfetante neutro comum.

Instruções de Utilização:

Para agarrar o objeto, segure o dispositivo e aproxime-se cuidadosamente do objeto e, em seguida, pressione a alavanca de controlo posicionada na pega. Direcione o objeto para uma superfície segura, coloque sobre a superfície em questão e largue a alavanca de controlo.

Imagens do Artigo: