

PACK PRACTI-BABY



INCLUI

1 bebé de treino, 1 Manual, 4 pulmões, 2 válvulas, 1 saco de transporte

CERTIFICADO DE GARANTIA



Este produto passou com sucesso os mais rigorosos controlos de qualidade antes de sair da fábrica. Contudo, em caso de qualquer avaria devido a montagem ou componentes, leia as condições de garantia e contacte o seu distribuidor autorizado mais próximo. VICEDO MARTÍ S.L. garante que este produto está livre de defeitos de fabrico a partir da data de fabrico por um período de dois anos. Se, durante o período de garantia, ocorrer um defeito atribuível a processos de fabrico ou materiais, o cliente deve informar o distribuidor oficial no prazo de dez dias após a primeira aparição do defeito e, a critério do distribuidor oficial, o produto será reparado ou substituído.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Detalhes e documentação: É necessária uma cópia da factura de compra para beneficiar da garantia. Para além das especificações do produto adquirido, a factura DEVE também conter o nome e o endereço do comprador.

Exclusões: Esta garantia exclui especificamente:

-Danos e/ou defeitos do produto resultantes de utilização indevida, negligência do utilizador, incluindo a utilização do produto para outros fins que não os previstos.

- Danos e/ou defeitos causados pela utilização de agentes externos, tais como ficheiros ou outros produtos químicos corrosivos.

- Danos e/ou defeitos devidos a manutenção inadequada ou falha de limpeza

- Danos e/ou defeitos devidos à utilização de partes não originais do manequim.

Cobertura geográfica: A garantia é estendida a todos os países em que este produto é vendido pelo distribuidor, VICEDO MARTÍ S.L. ou autorizado pelo mesmo.

Cancelamento da garantia: a garantia do produto é cancelada:

- Em caso de danos causados por reparações efectuadas por pessoal não autorizado pelos agentes de VICEDO MARTÍ S.L. e/ou se tiverem sido utilizadas peças ou acessórios que não sejam originais ou não produzidos por VICEDO MARTÍ S.L.

- Alteração da data na factura, recibo de venda ou embalagem


CPR MANIKIN PRACTI-BABY

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES



➤ PRACTI-BABY O MANEQUIM PEDIÁTRICO + REALISTA

GRAÇAS À SUA APARÊNCIA, TAMANHO E MOVIMENTOS, O PRACTI-BABY PERMITE UMA REANIMAÇÃO PEDIÁTRICA ADEQUADA, ADAPTANDO-SE A VÁRIAS NECESSIDADES DE ENSINO.

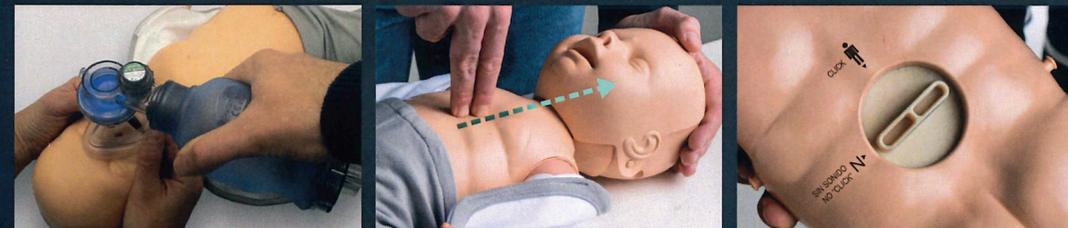

VERDADEIRA PRÁTICA RESPIRATÓRIA

➤ Excelente resultado durante a prática com o reanimador

➤ O movimento da cabeça permite uma respiração correcta

➤ FEEDBACK ACUSTICO

Graças ao interruptor de selecção, é possível escolher se o exercício deve ser realizado com ou sem um clique.

ALTRI VANTAGGI DEL PRACTI-BABY



VIA AÉREA GUEDEL

➤ Para praticar com a cânula Guedel, colocar a tampa facial sem a válvula.

➤ Prática de asfixia.

➤ Formação AED
A utilização de electrodos não deixa resíduos na pele.



VICEDO MARTÍ S.L.

C/ Ávila, 2 03440 Ibi - SPAIN TEL. +34 965 554 708

www.practiman.com - info@practiman.com - international@practiman.com



PRACTI-MAN

CPR TRAINING SOLUTIONS

by Vicedo Marti

COMO MONTAR O BEBÉ DE TREINO




1 Remoção da tampa torácica




2 Remoção da cobertura facial



3 Passar o pulmão por baixo da mandíbula.

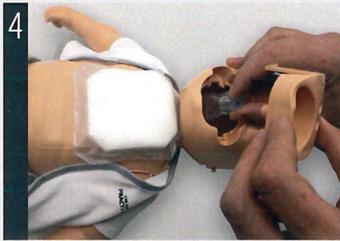

4 Ligar a válvula ao pulmão.

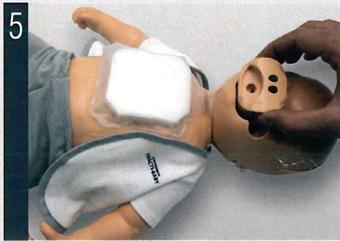

5 Assegurar que a válvula está correctamente ligada à cabeça.



6 Colocar o pulmão sobre o peito.



7 Posicionar a cobertura facial e assegurar que o nariz, a boca e a aba superior encaixam correctamente.



8 Posicionar a tampa do peito e prendê-la nos ganchos.

Peças de reposição para o bebé de treino



PULMÃO
(Ref. SP-001 (PB))



VÁLVULA
(Ref. SP-002 (PB))




COBERTURA FACIAL
(Ref. Face-PB)




COBERTURA TORÁX
(Ref. Chest-PB)

RECOMENDAÇÕES PARA A LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Para assegurar as melhores condições de higiene, o fabricante recomenda a limpeza do bebé praticante após cada utilização, de acordo com as instruções abaixo.

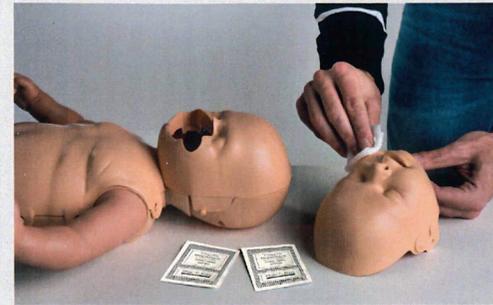

É necessário limpar o boneco desinfectando os lábios e o rosto, separando a cobertura facial da cabeça após cada exercício realizado pelos alunos.

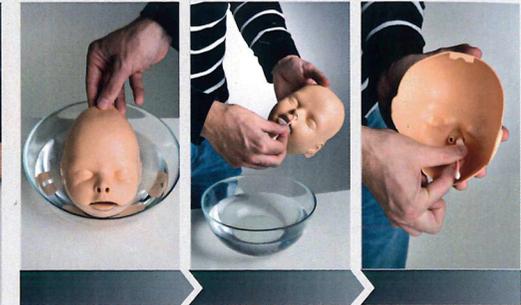

Para uma desinfecção mais completa, mergulhar a tampa facial num recipiente contendo uma solução desinfetante, limpar cuidadosamente e mantê-la seca para uma utilização adequada.



Após cada utilização, a válvula do Practi-baby deve ser desinfetada e deixada a secar para um bom funcionamento.



O pulmão do Practi-baby é semi-reutilizável e é adequado para dirigir uma sessão de ensino para um grupo de várias pessoas sem ter de o mudar. Se o peito parar de se levantar durante o exercício, verificar se o pulmão não está molhado, caso em que deve ser substituído por um novo.

PROTECÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DO TREINO



A protecção durante a formação é complementada pela utilização de máscaras de protecção respiratória



Para assegurar uma limpeza adequada do boneco, utilizar toalhetes desinfetantes