

Finalidade: Dispositivo de transferência completo e leve para transferir pacientes de um lugar para outro com muito pouco esforço e segurança. A sua forma foi concebida para ajudar o prestador de cuidados. As caneleiras são macias e confortáveis, ajustáveis em altura para se adaptarem a todos os tamanhos.

Aviso: O utilizador deve ser capaz de suportar o seu próprio peso e manter o equilíbrio. Deve também ser capaz de agarrar as pegas.

Características: Estrutura em alumínio e aço.
Duplo ajuste de altura da pega e das caneleiras
Dimensões globais: largura 45cm x profundidade 49cm x altura 80/126 cm
Diâmetro da base: 41 cm
Diâmetro da roda: 8 cm
Dimensões do apoio das pernas : largura 18 cm x altura 16 cm
Peso: 8,1 kg
Peso máximo permitido: 200 kg

Cor: Preto e Azul

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Declaração de conformidade:

Modelo: 815197

Marca: Identités

Fabricante/Distribuidor: Identités
Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda
Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento: Inspeccionar semanalmente o produto para detetar quaisquer sinais de desgaste ou danos. Verificar se a plataforma rotativa pode girar livremente. Verificar o estado das joelheiras e da pega, certificando-se de que as rodas de mão estão corretamente localizadas e seguras. Qualquer suspeita de avaria ou dano deve ser imediatamente comunicada ao fornecedor e o produto retirado de uso. Limpar regularmente utilizando um detergente de uso geral, neutro e água morna. Não utilizar produtos de limpeza ou panos abrasivos

Instruções de utilização: Posicionar o disco de transferência aos pés do utilizador sentado. Permitir ao utilizador colocar os seus pés sobre a plataforma. Deslizar o disco de transferência para a frente até as joelheiras tocarem nas canelas dos utilizadores. Dizer ao utilizador para colocar os seus pés no centro da plataforma, à largura da anca à distância. Ficar de pé atrás do disco de transferência, de frente para o utilizador, com um pé na plataforma para contrabalançar o utilizador e segurar a barra superior do punho horizontal com ambas as mãos. O utilizador deve então agarrar a barra inferior da pega horizontal. O utilizador deve utilizar as barras de punho horizontais para se levantar progressivamente para uma posição de pé.

Imagens do Artigo:

